



مشد الرسغ A2

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلالتل الاستعمال:

مشد الرسغ الهوائي Aircast A2 مصمم لتوفير الدعم لإصابات الرسغ (تمزق متكرر في الأربطة، الالتواء أو شد العضل) ومتلازمة النفق الرسغي وللإستخدام ما بعد الجراحة وبعد نزع الجبس أو الجبيرة.

موانع الاستعمال: غير متوفرة

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

1. فك الأحزمة يجب أن يبقى الحزام الأوسط وحزام الذراع ملفوف من خلال الحلقات السوداء في المشد.
2. حايز المشد مع النسيج الأخضر نحو الإبهام والحزام الرفيع (حزام اليد) نحو أصابع اليد. ادخل اليد في المشد واسحب المشد للأعلى فوق الرسغ حتى تصل نهاية المشد قبل الأطراف (ينبغي أن تثني الأصابع عند الأطراف بحرية).
3. ثبت أحزمة مشد الرسغ بالترتيب: الحزام الأوسط، حزام اليد وحزام الذراع.
4. اربط الأحزمة حتى تصبح على قدر الجسم ومريحة. قد تُشدّ جميع الأحزمة بمقصد وفقاً لما هو مطلوب.

تعليمات التنظيف:

تغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء. انزع المثبتات المزدوجة قبل التنظيف:
المثبت المفتوح في داخل المشد.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

بدون لاتكس

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التوافق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، وليس هناك ما يضمن بأنه سيتم منع الإصابة باستخدام هذا المنتج.