



### داعم الكاحل A60tm

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

#### هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

جهاز داعم الكاحل الهوائي، العلامة التجارية A60، مصمم لتوفير الدعم والحماية للكاحلين.

#### موانع الاستعمال: غير متوفرة

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

#### معلومات حول الاستعمال:

1. البس جوربًا.

- فك الحزام من الحلقة البلاستيكية السوداء، وافتح القلابات العلوية وافتح المشد.
- ادخل القدم، إصبع القدم أولاً، في قمة المشد.
- اسحب مثبتات المشد للأعلى وحاذي المثبتات مع جوانب الكاحل
- 2. اربط القلابات حول أعلى الكاحل وثبتها.
- 3. ادخل نهاية الحزام في الحلقة البلاستيكية السوداء.

- اثنِ الركبة وحاذيها فوق أصابع القدم.
- اسحب الحزام حتى النهاية وثبت نهاية الحزام على جسم الحزام.

#### **تعليمات التنظيف:**

يغسل كل داعم الكاحل A60 يدويًا في ماء فاتر مع صابون لطيف ويجفف في الهواء.

**كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

بدون لاتكس

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، وليس هناك ما يضمن بأنه سيتم منع الإصابة باستخدام هذا المنتج.