

# קרוסולית A60

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

## שימוש מיועד/התוויות:

קרוסולית A60™ של איירקסט מיועדת לספק תמיכה והגנה לקרוסול.

## התוויות נגד: לא רלוונטי

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

## הוראות יישום:

1. ראשית גרוב גרב

- שחרר את הרצועה מטבעת הפלסטיק השחורה ופתח את הסד באמצעות פתיחת הכנפיים העליונות.
- החלק את כף הרגל לתוך החלק העליון של הסד, כשהאצבעות מובילות.
- משוך את מייצבי הסד כלפי מעלה וישר את המייצבים מול צדי העקב.

2. כרוך את הכנפיים סביב החלק העליון של הקרוסול והדק.

3. הכנס את קצה הרצועה לתוך טבעת הפלסטיק השחורה.

• כופף את הברך כך שתהיה מעל האצבעות.

• משוך את הרצועה עד שהיא תחבוק את האזור והדק את קצה הרצועה לגוף הרצועה.

## הוראות ניקוי:

יש לכבס את קרוסולית A60 במלואה ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר.

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

נטול לטקס

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.