
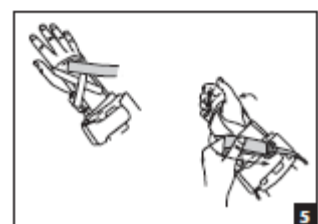
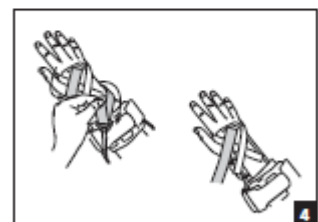
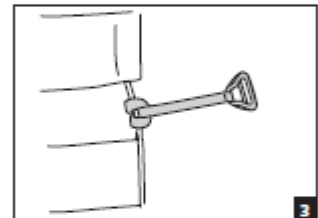
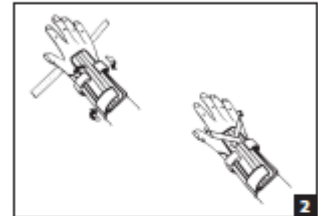


תומך ARC סיבובי לאמה

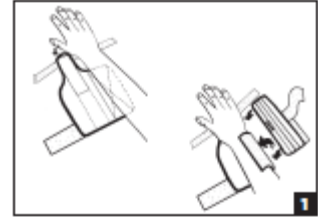

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

תומך ARC סיבובי לאמה משמש לשליטה בפרונציה (סיבוב כף היד פנימה) במקרים של פציעה/תיקון של הרצועה הקולטרלית הצדית ובכוויות פרונציה. שליטה בפרונציה אידאלית למקרים של פציעה/תיקון של הרצועה הקולטרלית האמצעית וכוויות סופינציה (סיבוב כף היד החוצה).

התוויות נגד: לא רלוונטי

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום:

- יש ליישם את תומך ARC סיבובי לאמה על כף היד ושורש כף היד. יש להצמיד את תומך ARC סיבובי לאמה לכף היד ולשורש כף היד לפני יישום תומך המרפק של מרפאת מאיו.
- פתח את הרצועות לחלוטין והפרד את התומך התחתון של שורש כף היד מהתומך העליון של שורש כף היד. (את רצועת הפרונציה/סופינציה ואת הרצועה של הטבעת בצורת D מקם בצד לשימוש בהמשך).
- הנח את התומך התחתון של שורש כף היד כשהוא שטוח והנח מעליו את האמה, כשכף היד מופנית כלפי מטה (תרשים 1).
- כרוך את החלק הצדדי של תומך שורש כף היד סביב שורש כף היד. הנח את התומך העליון של שורש כף היד על שורש כף היד והצמד אותו לתומך התחתון (תרשים 2).
- כרוך את הרצועות סביב שורש כף היד. קודם את הרצועה הקצרה ואז את הארוכה. השחל את קצה הרצועה הארוכה לתוך הטבעת והדק (תרשים 3).
- כרוך את רצועות האצבעות סביב האצבעות והצמד אותן לתומך העליון של שורש כף היד (תרשים 4).

- כוונן שוב את כל הרצועות עד שתחושו שהתומך צמוד אך נוח. (שורש כף היד מוצג בפרונציה).
- 2. הכנת תומך המרפק של מרפאת מאיו**
- הפרד את רצועת הפרונציה/סופינציה מרצועת הטבעת בצורת D (נכללת עם תומך ה-ARC הסיבובי לאמה).
 - חבר את רצועת הטבעת בצורת D לפס של תומך המרפק.
- לפרונציה, חבר את הרצועה לפס האמצעי של תומך המרפק.**
- לסופינציה, חבר את הרצועה לפס הצדי של תומך המרפק.**
- כרוך את הרצועה סביב הפס הנמצא בין רצועת האמה למסגרת התומכת בשורש כף היד. השחל את הקצה החופשי של הרצועה לתוך הלולאה ומשוך אותה עד הסוף והצמד אותה (תרשים 5).
- 3. יישום תומך המרפק של מרפאת מאיו על היד**
- יישם את תומך המרפק של מרפאת מאיו (עייין בעלון ההוראות המצורף לתומך המרפק). תומך המרפק יחפוף את תומך ה-ARC הסיבובי לאמה.
 - נעל את תומך המרפק בזווית של 90°.
- 4. חיבור של תומך ה-ARCTM הסיבובי לאמה ליישום הפרונציה של תומך המרפק של מרפאת מאיו**
- חבר את רצועת הפרונציה/סופינציה לחלק העליון של תומך שורש כף היד, כאשר הקצה החופשי פונה לכיוון האגודל (תרשים 6).
 - כרוך את הרצועה סביב כף היד ושורש כף היד בזווית של 45° (תרשים 7).
 - השחל את הקצה החופשי של הרצועה לתוך הטבעת בצורת D שבחלק האמצעי של תומך המרפק (תרשים 7).
 - משוך את הרצועה דרך הטבעת בצורת D והצמד אותה היטב.
 - הדק את הרצועה עד כמה שביכולתך לסבול, כדי להגדיל את הפרונציה.
- יישום סופינציה**
- חבר את רצועת הפרונציה/סופינציה לחלק העליון של תומך שורש כף היד, כאשר הקצה החופשי פונה לכיוון הזרת (תרשים 8).
 - כרוך את הרצועה סביב כף היד ושורש כף היד בזווית של 45° (תרשים 9).
 - השחל את הקצה החופשי של הרצועה לתוך הטבעת בצורת D שבחלק הצדי של תומך המרפק (תרשים 9).
 - משוך את הרצועה דרך הטבעת בצורת D והצמד אותה היטב.
 - הדק את הרצועה עד כמה שביכולתך לסבול, כדי להגדיל את הסופינציה.
- הערה:** בעת שימוש בתומך ARC סיבובי לאמה לשליטה בפרונציה/סופינציה, ייתכן שהרצועה תהיה ארוכה מדי לחלק מהמטופלים. במקרה הצורך, כוונן את מיקום הרצועה על החלק העליון של תומך שורש כף היד וגזור את החלק העודף של הרצועה.
- הוראות ניקוי:**
- את תומך ה-ARC הסיבובי לאמה יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין ולהניח לו להתייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה או באמצעות מקור חום אחר.
- אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.
- מאיו (MAYO), מרפאת מאיו (MAYO CLINIC), ותומך המרפק של מרפאת מאיו (MAYO CLINIC ELBOW BRACE) הם סימני מסחר של Mayo Foundation for Medical Education and Research. **מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.**
- במרשם בלבד
נטול לטקס**

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.

זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.