

**DONJOY**

## Abdostrap II

ABDOMINAL SUPPORT  
CEINTURE ABDOMINALE  
FAJA ABDOMINAL  
ABDOMINALBANDAGE  
SOSTEGNO ADDOMINALE  
BUİK STEUN  
BRUŠNÉ PÁS  
BŘIŠNÍ PÁS  
MAVE STOTTE  
MAGSTÖD  
VATSA TUKI  
BUKBAND  
FAJKA ABDOMINAL



**DJO**  
GLOBAL



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

#### هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- لتوفير ضغط ودعم للإجهاد والضعف في منطقة البطن (للاستخدام بعد عملية جراحية، فتق بسيط، بعد الولادة).

#### موانع الاستعمال

- لا توجد

#### تحذير واحتياطات

المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

#### تعليمات الاستخدام

- ضع حزام دعم البطن حول الخصر. يمكن وضع القسم غير المضلع المصنوع من مادة مرنة
    - إما بشكل مركزي على البطن
    - أو في المكان حيث ستكون حاجة إلى فتحة (لإدخال مسبار، قسطن...)
  - مع الحفاظ على حزام دعم البطن في مكانه، اسحب إبرييم وحلقة لسان الإغلاق وثبتهما على حزام دعم البطن، في أنسب مكان للإغلاق.
  - اضبط إبرييم وحلقة لسان الإغلاق حتى يتم الحصول على الضغط المرغوب.
- ملاحظة: يمكن قصّ فتحة عبر القسم غير المضلع المصنوع من مادة مرنة (بدون تنسيل) لإتاحة إدخال مسبار أو قسطن. لا يمكن قص القسم المصنوع من مادة مرنة مضلعة.

#### شريط مطاطي يمكن إزالته

للحصول على دعم إضافي للبطن، استخدم الشريط المطاطي القابل للإزالة. ضع الشريط المطاطي على الجزء المركزي من حزام دعم البطن وقم بثنيتيه مع الإبرييم والحلقة. اسحب طرفي الشريط المطاطي، حتى تحصل على مستوى الراحة و الدعم المطلوب، ومن ثم تثبتهما على حزام دعم البطن باستخدام الإبرييم والحلقة.

#### العناية

اغسله في مياه فاترة مع مادة منظفة خفيفة. لا تستعمل مواد التبييض. اشطفها جيداً. نشفها في الهواء. لا تجففه في النشافة. لا تنظفه بالتنظيف الجاف. الكي ممنوع.

#### التركيب

بولي أميد، بوليستر، بوليفينيل كلوريد (PVC)، إيلاستين، فولاذ

#### بدون لاتكس

#### مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

#### الكفالة

إطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة سنة أشهر من تاريخ البيع.

Abdostrap II

حزام دعم البطن

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
Hannover 30175  
Germany

DJO, LLC  
Decision Street 1430  
Vista CA 92081-8553  
USA  
هاتف: +1 760.727.1280  
فاكس: +1 760.734.4712  
www.DJOglobal.com