

Abdostrap II

חגורת בטן



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

- יצירת לחץ ותמיכה במצבי מתיחה וחולשה באזור הבטן (שימוש לאחר ניתוח, בקעים פשוטים, לאחר לידה).

התוויות נגד

- אין

אזהרות

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

- מקם את חגורת הבטן סביב המותניים. את החלק הלא-מפוספס של החומר הגמיש ניתן למקם במרכז הבטן
- או למקם אותו לפי המיקום הרצוי של הפתח (לדוגמה, להעברת קטטר...)

- החזק את חגורת הבטן במקום, ותוך כדי כך משוך בלשונית הסגירה עם הצמדן ומקם אותה על חגורת הבטן, במקום המתאים ביותר לסגירה.
 - כוונן את לשונית הצמדן עם הסגירה עד שתשיג את מידת הלחץ הרצויה.
- הערה: ניתן לחתוך פתח בחלק הלא-מפוספס של החומר הגמיש (ללא שפשוף), לדוגמה, כדי להעביר דרכו קטטר. אין לחתוך את החלקים המפוספסים של החומר הגמיש.

רצועה גמישה נשלפת

לתמיכה נוספת בבטן ניתן להשתמש ברצועה הגמישה הנשלפת.
מקם את הרצועה הגמישה על החלק המרכזי של חגורת הבטן וחבר אותה באמצעות הצמדן.
משוך בשני קצות הרצועה הגמישה עד שתשיג את הרמה הרצויה של נוחות ותמיכה. לאחר מכן הצמד אותם על חגורת הבטן באמצעות הצמדן.

הוראות ניקוי

יש לכבס במים פושרים עם סבון כביסה עדין. אין להשתמש בחומר מלבין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

הרכב

פוליאמיד, פוליאסטר, PVC, אלסטון, פלדה

נטול לטקס

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות

חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
Hannover 30175
Germany

DJO, LLC
Decision Street 1430
Vista CA 92081-8553
USA
טל' +1 760.727.1280
פקס +1 760.734.4712
www.DJGlobal.com