

DONJOY

AchilloForce Air™





قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

بروفيل المستخدم المقصود

يجب أن يكون المستخدم قادرًا على ما يلي:

- قراءة وفهم التوجيهات، التنبيهات والتحذيرات.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

دعامة مرنة ومنسوجة للكاحل مع خلايا هوائية لتوفير ضغط متقطع على وتر أخيل (العرقوب)

الميزات

- خلايا هوائية مترابطة
- تمنح الخلايا الهوائية تأثير تدليك على منطقة وتر أخيل
- نسيج يتكيف شكله للمبنى التشريحي بثلاثة أبعاد لتوفير ضغط مريح ومنظم
- مادة صالحة للتنفس

دلائل الاستعمال

- التهاب مزمن أو التهاب بعد صدمة في منطقة وتر أخيل
- التهاب وتر أخيل، وجع العرقوب (ألم في منطقة وتر أخيل)
- التهاب اللقافة الأخرسية

موانع الاستعمال

- ينبغي استخدام الدعامة فقط بعد استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:
- أمراض جلدية وإصابات في المنطقة المصابة (مثل تغيرات جلدية متعلقة بالحساسية، تهيج، ندبات مع تورم، احمرار، ارتفاع حرارة الجسم)
 - اضطرابات لمفاوية، تورم النسيج الرخو بشكل غير واضح في المنطقة المصابة
 - اضطرابات بالدورة الدموية أو اضطرابات حسية في المنطقة المصابة

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

(الارتفاع العالي) تتوسع الخلايا الهوائية في الارتفاعات العالية فوق مستواها الأمثل. اضبط ضغط الخلية الهوائية من خلال شد أو تخفيف الدعم و/أو الحزام.

تعليمات الاستخدام

نوصي بارتداء جورب رقيق لتسهيل الاستعمال ولأسباب صحية أيضًا.
1. اجلس من أجل وضع الدعامة.

2. افتح إقفال الإبريم والحلقة في الجزء العلوي من الدعامة، أدخل القدم في منطقة الأصابع بالدعامة أولاً، ثم اسحب الدعامة فوق القدم الأمامية والكاحل.
 3. تأكد من أن الخلية الهوائية السفلى موضوعة تحت الكعب.
 4. أغلق إقفال الإبريم والحلقة في الجزء العلوي من الدعامة، متأكدًا من أنها لا تسبب شعورًا بضيق أو ضغط شديد.
 5. ينبغي وضع الخلية الهوائية الخلفية العليا على كلا جانبي وتر أخيل.
 6. قم بوصل الحزام القابل للإزالة بالقطعة المخملية الصغيرة الموجودة على الجزء الخلفي من الدعامة. لف الحزام حول الكاحل، لتوفير ضغط إضافي. تجنب شد الحزام أكثر مما يجب وحرره على الفور إذا شعرت بأنه ضيق للغاية.
- أثناء المشي، سيدور الهواء بين الخلية الهوائية العليا والسفلى، مما يوفر ضغطًا متقطعًا وتأثير تدليك على وتر أخيل.
- نصيحة: عند استخدام الحزام القابل للإزالة، تجنب التلامس المباشر بين إبريم وحلقة الحزام والدعامة المنسوجة، لأن ذلك سيتلف الجانب المرني للنسيج.

تعليمات الاستخدام

- إذا قمت بلبس الدعامة مباشرة على الجلد، ينبغي أن يكون الجلد خاليًا من الإصابات، الرطوبة، الزيوت، الكريمات، الجل أو بقايا مواد مشابهة عند استخدام الدعامة.
- ينبغي عدم لبس الدعامة لأكثر من 8 ساعات في اليوم.
- مع الاستخدام السليم ومراعاة كل التعليمات، لن تظهر نقاط ضغط.
- لن يتحمل المنتج أية مسؤولية عن أي تغييرات في المنتج أو عن استخدام غير صحيح.

العناية

- ينبغي غسلها باليد في مياه فاترة (30 درجة مئوية) مع مادة منظفة معتدلة
- نشفها في الهواء (لا تضعها على مشعاعات/سخانات أو غيرها من مصادر الحرارة)
- لا تستخدم مواد التبييض أو الكلور، الكي ممنوع.

التركيب

- المواد المنسوجة: مادة البولي أميد، إيلاستين، بوليستر، لاتكس من المطاط الطبيعي
- الغطاء الداخلي: قماش تيري
- الخلايا الهوائية: غشاء من البولي يورثان؛ أنبوب بولي إيثر / بولي يورثان؛ رغوة بولي إيثر
- الحزام: بولي أميد

تحذير: يحتوي هذا المنتج على لاتكس من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب ردود فعل حساسية.

مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

الكفالة

بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

AchilloForce Air
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
Hannover 30175
Germany
DJO, LLC
Decision Street 1430
Vista CA 92081-8553
USA
هاتف: +1 760.727.1280
فاكس: +1 760.734.4712
www.DJOglobal.com