
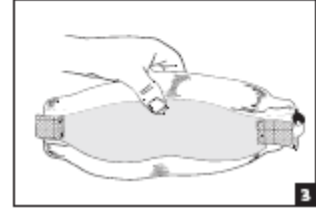
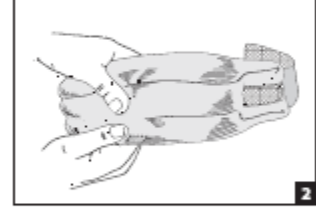


مشد ADAMS

طوق خاص بالعنق مع دعامة صلبة قابلة للنزع

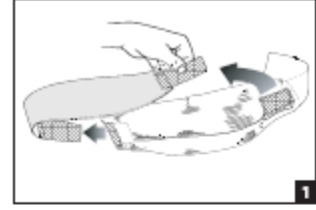

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

نوع المنتج

طوق خاص بالرقبة شبه صلب – دعم متوسط

المميزات

3-قناة قطن مع حبيبات البوليسترين الصغيرة ودعامة بلاستيكية القابلة للنزع.

التركيب

قماش قطني مصنوع من 100% قطن

دلائل الاستعمال

تلف النسيج الناعم للرقبة.

حالات الإصابة بالرقبة نتيجة الارتداد.

الإصابات الخاصة بالعنق.

دعامة مريحة شبه صلبة للفقرات المؤلمة المصابة بالهبوط لدى المرضى الذين لا يمكنهم ارتداء دعامات صلبة تماماً.

موانع الاستعمال

لا توجد

الحجم والقياسات

محيط الرقبة.

صغير

متوسط

كبير

سم 34 - 27

"13 – "10.5

سم 38 - 31

"15 – "12

سم 42 - 35

"16.5 – "13.5

تعليمات الاستخدام

لضمان دعم فعال وكاف، يمكن نزع الحبوب الصغيرة لتوفير الراحة والملائمة.

(1) انزع الدعامة البلاستيكية الصلبة من الطوق الخاص بالرقبة.

(2) انزع الحبيبات الصغيرة الموجودة في حلقات الطوق الخاص بالرقبة، لتعزيز كثافة الطوق في المنطقة التي تحتاج لدعم إضافي.

(3) ضع الدعامة البلاستيكية الصلبة حول الطوق.

(4) ضع الطوق حول الرقبة وأغلقه باستخدام عروات سدادات الاتصال.

(5) إذا لزم الأمر، كرر الخطوات من 1 إلى 4 لضمان الدعم الكافي.

تعليمات العناية

يغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويشطف تمامًا. نشفها في الهواء. لا تغسله جافًا أو تستعمل معه المبيض.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.