
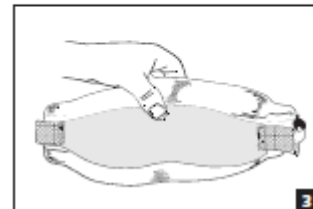
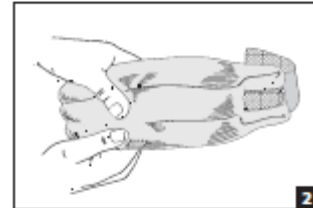


צווארון אדמס

צווארון בעל פס קשיח נשלף

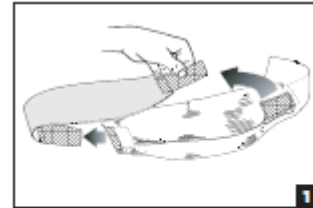

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

סוג המוצר

צווארון קשיח למחצה - תמיכה בינונית

תכונות

סריג כותנה בעל שלוש תעלות, הכולל חרוזים זעירים מפוליסטרין ופס פלסטיק נשלף

הרכב

הסריג עשוי 100% כותנה

התוויות

- נזק לרקמה הרכה של הצוואר
- פגיעת צליפת שוט
- פציעות בצוואר.
- צווארון נוחות קשיח למחצה לשברי דחיסה כואבים בחוליות, במטופלים שאינם מסוגלים לחבוש צווארון קשיח מלא.

התוויות נגד

אין

מידות

היקף הצוואר

S	10.5" – 13"	27 - 34 ס"מ
M	12" – 15"	31 - 38 ס"מ
L	13.5" – 16.5"	35 - 42 ס"מ

הוראות יישום

כדי להבטיח יעילות ותמיכה מספקת ניתן להזיז את החרוזים הזעירים ולהתאים את הצווארון בנוחות.

(1) הוצא את פס הפלסטיק הקשיח מהצווארון.

(2) הזז את החרוזים הזעירים הנמצאים בתוך טבעות הצווארון, וחזק את צפיפות הצווארון באזור הזקוק לתמיכה נוספת.

(3) מקם את פס הפלסטיק הקשיח סביב הצווארון.

(4) הנח את הצווארון סביב הצוואר וסגור אותו באמצעות לשוניות הצמדן.

5) במקרה הצורך, חזור על שלבים 1-4 כדי להבטיח שהצווארון תומך היטב בצוואר.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לכבס במכונת כביסה או להשתמש בחומר מלבין.
אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.