



مشد Air-Stirrup II

الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل صحيح.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: يوفر الدعم لمنع الإصابة الإضافية للكاحل للحد الفعّال من الانعكاس والانقلاب للخارج.

موانع الاستعمال: غير معروفة

التحذيرات والاحتياطات: يستخدم فقط على الكاحل. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك. لا تستخدم المشد إذا تلفت الصدفات أو الأحزمة.

معلومات حول الاستعمال:

(1) عدّل عرض رفادة الكعب:

- فكّ أحزمة المشد. ارفع أسفل خلايا الهواء بعيدًا عن الصدفة لتكشف رفادة الكعب.
- عدّل عرض رفادة الكعب للحصول على تطابق مريح (الشكل 1) في الكاحل.
- اضغط بحزم على أحزمة الكعب وخلية الهواء لتعود إلى مكانها.

(2) ثبت الدعامة:

- اخط بالمشد تمشياً مع مخطط القدم على رفادة الكعب (يمكن لبس جورب أو لفافة ملاءة قماش مرنة للحصول على راحة وضغط إضافي).

• حاذي جوانب المشد مع الكاحل (الشكل 2).

3) اربط الأحزمة بإحكام:

- أقلل الأحزمة بإحكام من الأسفل للأعلى. (الشكل 3). لا تربط الأحزمة أكثر من اللازم.
- البس حذاء طويل أو حذاء رياضة.

4) عدل المشد:

- اضغط جانبي الدعامة معاً بيد واحدة.
- شد الأحزمة بإحكام من الأسفل للأعلى باليد الأخرى (الشكل 3) حتى تشعر بالارتياح.
- تعديل لياقة مشد الكاحل: خلايا الهواء في مشد الكاحل منفوخة مسبقاً وعادة لا تحتاج لتعديل. إذا واجهت قرص أو ضغط شديد، أعد تعديل الأحزمة ورفادة الكعب للحصول على تطابق صحيح. إذا استمرت الحالة، ينبغي ضبط حجم الخلية الهوائية (كمية هواء أكبر مما يجب ستمنح دعماً أقل):

- افتح الصمام في أعلى خلية الهواء (الشكل 4)
- ادخل أنبوب النفخ 1.5 بوصة في الصمام.
- أخرج كمية صغيرة من الهواء من خلال الضغط بلطف على الخلية الهوائية أو،
- أضف كمية صغيرة من الهواء من خلال النفخ لداخل الأنبوب.
- اضغط على الصمام الثابت أسفل، وانزع الأنبوب ببطء. اضغط على الصمام لتغلقه عند نزع الأنبوب.
- افتح الصمام من فوق وشده عكس الصدفة.

الارتفاع العالي: في الارتفاعات العالية ستتمدد خلايا الهواء بعد مستواهم الأمثل وقد ينبغي نزع الهواء من خلايا الهواء (انظر تعديل تطابق مشد الكاحل). عند الطيران، أعد تعديل الأحزمة للحصول على ضغط مريح.

تعليمات التنظيف: يغسل كل مشد الكاحل يدوياً في ماء فاتر مع صابون لطيف ويجفف بالهواء.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط. بدون لاتكس

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، ليس هناك ما يضمن أن استخدام هذا المنتج سيمنع الإصابة.