
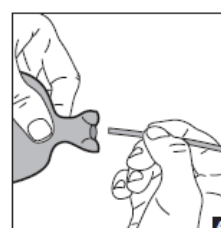
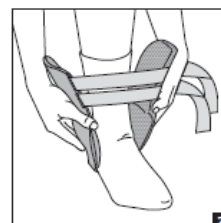


Air-Stirrup II

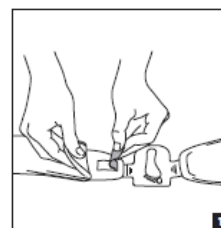

התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: הקרסולית תומכת בקרסול למניעת פציעה נוספת שלו באמצעות הגבלה יעילה של היפוך כף הרגל פנימה (אינברסיה) או החוצה (אברסיה).

התוויות נגד: אין התוויות נגד ידועות.

אזהרות: שימוש לקרסול בלבד. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי. אין להשתמש בקרסולית במקרה של פגם בחלקים הקשיחים או ברצועות.

הוראות יישום:

(1) כוונן רוחב רפידת העקב:

- פתח את רצועות הקרסולית. הרם את תחתית כריות האוויר הלאה מהחלק הקשיח וחשוף את רפידת העקב.
- כוונן את רוחב רפידת העקב לרוחב נוח לעקב (תרשים 1).
- לחץ היטב את רצועת העקב וכריות האוויר למקומן.

(2) הנחת הקרסולית:

- הכנס את כף הרגל בהתאם לתרשים כף הרגל הנמצא על רפידת העקב (ניתן לגרוב גרב או חבישה אלסטית לשיפור הנוחות ומידת הלחץ).
- יישר את צדי הקרסולית בקו אחד עם הקרסול (תרשים 2).

3) סגירת הרצועות:

- סגור את הרצועות מלמטה כלפי מעלה. (תרשים 3). אל תהדק את הרצועות יתר על המידה.
- **נעל נעל עם שרוכים או נעל ספורט. [G1]**

4) כוונן הקרסולית:

- לחץ ביד אחת את צדי הקרסולית זה אל זה.
- בידך השנייה הדק מחדש את הרצועות מלמטה כלפי מעלה (תרשים 3) עד שתחוש בנוח.
- **כוונן מידת הקרסולית לקרסול:** כריות האוויר של הקרסולית מנופחות מראש ובדרך כלל אין צורך לכוונן אותן. אם אתה חש צביטות או לחץ בלתי שווה, כוונן שוב את הרצועות ואת רפידת העקב למידה הנכונה. אם המצב נמשך, כוונן את נפח כרית האוויר (**עודף אוויר יפחית את התמיכה**):
- פתח את קיפול השסתום שבראש כרית האוויר (תרשים 4).
- החדר את צינורית הניפוח לעומק כ-4 ס"מ לתוך השסתום.
- לחץ קלות על כרית האוויר ורוקן מעט אוויר, או,
- נשוף לתוך הצינורית והוסף מעט אוויר.
- לחץ על השסתום מתחת לצינורית ושטח אותו, והוצא לאט את הצינורית. בעת הוצאת הצינורית, צבוט וסגור את השסתום.
- קפל את השסתום ותחב אותו כנגד החלק הקשיח.

שימוש בגבהים: כאשר נמצאים בגבהים, כריות האוויר מתנפחות מעבר לרמה המיטבית, וייתכן שיהיה צורך לרוקן אוויר מכריות האוויר (ראה "כוונן מידת הקרסולית לקרסול"). בעת טיסה יש לכוונן מחדש את הרצועות כך שהלחץ יהיה נוח.

הוראות ניקוי: יש לכבס את הקרסולית כולה ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. נטול לטקס

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.