
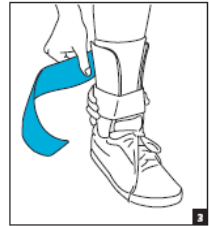
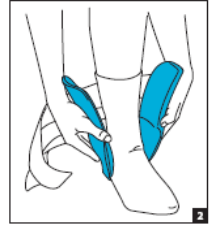


Air Stirrup Ankle Brace

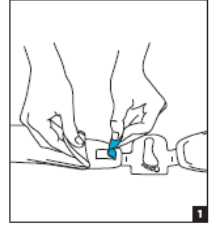

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/اللائل الاستعمال: يوفر Air-Stirrup الدعم لمنع إصابة إضافية بالكاحل من خلال تحديد عكس وانقلاب الكاحل بنجاعة.

موانع الاستعمال: لا ينطبق

تحذيرات واحتياطات:

كما هو الحال مع جميع الأجهزة المستعملة للأطراف السفلية، مثل جبيرة أو دعامة، ينبغي الإشراف على المرضى الذين بدون إحساس (مثلاً تخدير بعد عملية جراحية، اعتلال عصبي وما شابه) بشكل متكرر بحثاً عن "نقاط ساخنة"؛ تهيج الجلد أو معالجة الجروح. ينبغي أن ترتدي دائماً جورباً ماصاً أو ضمادة للكاحل عند استخدام دعامة

Air-Stirrup للكاحل.

معلومات حول الاستعمال:

1. عدّل عرض رفادة الكعب

- افتح الدعامة وارفع قاعدة الخلايا الهوائية حتى تصبح أحزمة الكعب مكشوفة كلياً.
- انزع أحزمة الكعب وعدّل عرض رفادة الكعب لتلائم مقاسك بالضبط (الشكل 1).
- اضغط بحزم على أحزمة الكعب والخلية الهوائية ليعودوا إلى مكانهم

2. ضع الدعامة -

- لبس الجورب الماص أو ضمادة الكاحل.
- ضع حافة رفادة الكعب المستديرة تحت الكعب.
- حاذي جوانب المشد مع الكاحل (الشكل 2).

3. اربط الأحزمة بإحكام

- أقلل الأحزمة بإحكام من الأسفل للأعلى
- لبس حذاء مع رباط أو حذاء رياضي

4. عدّل الدعامة

- اضغط جانبي الدعامة معاً بيد واحدة
- شدّ الأحزمة من الأسفل للأعلى باليد الأخرى (الشكل 3).
- شدّها لدعم مريح.

تعديل ملاعمة دعامة الكاحل

الخلايا الهوائية بدعامة الكاحل منفوخة مسبقاً ولا تحتاج عادة أي تعديل.

إذا شعرت بقرص أو بضغط غير متساوٍ:

- غير وضعية الدعامة أو،
- عدّل من جديد رفادة الكعب والأحزمة. استخدم الخطوط التي على رفادة الكعب كمرجع.
- إذا استمرت الحالة، ينبغي ضبط حجم الخلية الهوائية (كمية هواء أكبر مما يجب ستمنح دعماً أقل):
- افتح الصمام الذي بأعلى الخلية الهوائية.
- أدخل أنبوب نفخ للصمام حوالي 4 سم.
- أخرج كمية صغيرة من الهواء من خلال الضغط بلطف على الخلية الهوائية أو،
- أضف كمية صغيرة من الهواء من خلال النفخ لداخل الأنبوب.

• اضغط على الصمام الثابت أسفل، وانزع الأنبوب ببطء.

• قم بطي الصمام.

الارتفاع العالي:

سوف تتوسع الخلايا الهوائية في الارتفاعات العالية فوق مستواها الأمثل، وينبغي إخراج الهواء من الخلايا الهوائية (راجع تعديل ملاءمة دعامة الكاحل). عند الطيران، ينبغي تعديل

الأحزمة مرة أخرى لضغط مريح. العناية

يمكن غسل Ankle Brace بكامله باليد بمياه فاترة مع صابون معتدل وتجفيفه بالهواء.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة سنة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطبيق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، وليس هناك ما يضمن بأنه سيتم منع الإصابة باستخدام هذا المنتج.