



#### **AirHeel™/AirHeel™ مع مثبتات**

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل صحيح.

#### **هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال**

Aircast AirHeel™ مخصص لالتهاب اللفافة الأخرسية والتهاب وتر أخيل.

Aircast AirHeel مع المثبتات معد لالتهاب اللفافة الأخرسية، لالتهاب وتر أخيل ولعدم الاستقرار المزمن في الكاحل.

#### **موانع الاستعمال: غير متوفرة**

**تحذيرات واحتياطات: (الارتفاع العالي)** سوف تتوسع الخلايا الهوائية في الارتفاعات العالية فوق مستواها الأمثل. اضبط ضغط الخلية الهوائية من خلال شد أو تحرير الشريط. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

#### **معلومات حول استعمال AIRHEEL:**

البس جوربًا. أدخل القدم لـ AirHeel، اصبع القدم أولاً. ضع الكعب في الفتحة التي بالجزء الخلفي من اللفافة. ضع خلية أخيل الهوائية على الوتر. يمكن تعديل ارتفاع خلية أخيل الهوائية من خلال تحريرها وإعادة وصلها بحزم بالمكان.

ضع القدم بشكل مستوي على الأرض، واربط حزام الكاحل بإحكام. تأكد من أن خلية القدم الهوائية موجودة تحت قوس القدم. لضبط تلائم AirHeel مع القدم، ينبغي شد/رخي حزام الكاحل.

#### **معلومات حول استعمال AIRHEEL مع المثبتات:**

اتبع تعليمات استعمال AirHeel المبينة أعلاه. تأكد من أن المثبتات موضوعة بشكل صحيح على طول الجزء الداخلي والخارجي من الكاحل لتوفير الدعم المناسب.

#### **تعليمات التنظيف:**

يمكن غسل AirHeel بكامله بمياه باردة حرارتها 30 درجة مئوية/85 فهرنهايت مع صابون معتدل وتجفيفه بالهواء.

#### **الكفالة:**

بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو ب جودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط. غير مصنوع من لاتكس من مطاط طبيعي

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.