


AirHeel™/AirHeel™ עם מייצבים

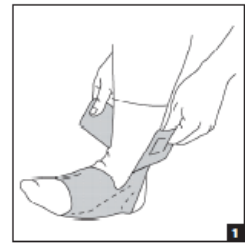

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות:

AirHeel™ של איירקסט מיועד למקרים של דלקת החיתולית הפלנטרית ודלקת בגיד אכילס.

AirHeel של איירקסט עם מייצבים מיועד למקרים של דלקת החיתולית הפלנטרית, דלקת בגיד אכילס וחוסר יציבות כרונית של הקרסול.

התוויות נגד: לא רלוונטי

אזהרות: (שימוש בגבהים) כאשר נמצאים בגבהים, כריות האוויר מתנפחות מעבר לרמה המיטבית. יש להדק או לשחרר את הרצועות כדי לכוון את הלחץ בכרית האוויר. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות ליישום AIRHEEL:

ראשית גרוב גרב. הכנס את כף הרגל לתוך ה-AirHeel, כשהבוהן קודם. מקם את העקב כנגד הפתח שבחלק האחורי של הקרסולית. מקם את כרית האוויר של גיד האכילס מעל לגיד. כדי למקם מחדש את גובה כרית האוויר של גיד האכילס ניתן לנתקה ולהצמידה שוב היטב למקומה.

הנח את כף הרגל שטוחה על הקרקע וסגור את רצועת הקרסול. ודא שכרית האוויר של כף הרגל נמצאת תחת קשת כף הרגל. כדי לכוון את המידה של AirHeel יש להדק/לשחרר את רצועת הקרסול.

הוראות ליישום AIRHEEL עם מייצבים:

פעל על-פי הוראות היישום של AirHeel המופיעות לעיל: ודא שהמייצבים ממוקמים כיאות לאורך הצד הפנימי והחיצוני של הקרסול, כך שהם מספקים תמיכה נאותה.

הוראות ניקוי:

יש לכבס את קרסולית AirHeel כולה ביד במים קרים בטמפרטורה של 30°C עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר.

אחריות:

חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד. לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

הערה: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.