



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلایل الاستعمال

تم تصميم مشد القدم الهوائي PTTD لتقديم الدعم لقصبة الساق الأمامية ضعيفة الوتر (PTTD) في المرحلة الأولى والمرحلة المبكرة الثانية، أو بحثاً عن علامات وأعراض الكبار في القدم المسطحة المكتسبة. يمكن استخدام المشد كذلك قبل العملية الجراحية وأثناء إعادة التأهيل.

موانع الاستعمال: يجب عدم استخدام مشد القدم الهوائي PTTD للمرضى المصابين بالالتواء العكسي أو الكسور.

تحذيرات واحتياطات:

لا تنفخ خلايا الهواء أكثر من اللازم. قد يسبب النفخ غير الصحيح للخلايا الهوائية تمزق شديد في الجلد لدى المرضى المصابين بالاعتلال العصبي السكري. تخفيض ضغط خلايا الهواء عند ظهور أي تغيرات في الجلد أو الشعور بعدم الارتياح. لا تستخدم هذا الجهاز للمرضى العاجزين عن التواصل الجسدي غير المريح. قد يؤثر التغير في الارتفاعات على ضغط خلايا الهواء. تعديل الأحزمة أو ضغط خلايا الهواء (انظر تعليمات "تعديل ضغط خلايا الهواء") للوصول إلى التطابق المريح.

معلومات حول الاستعمال:

1. حضّر الدعامة

فك الأحزمة وافتح الدعامة.

2. تثبيت الدعامة

البس جوربًا. ادخل القدم، إصبع القدم أولاً، في خلف المشد اسحب مثبتات المشد للأعلى وحاذي المثبتات مع جوانب الكاحل (الشكل 1). لف الحزام الأسفل حول ظهر الكاحل وثبته بشكل مريح (الشكل 2). اسحب قوس حزام الدعم حتى يكون مريح تحت القوس. لف الحزام الأسفل حول ظهر الكاحل ثم أمام الكاحل وثبته بشكل مريح (الشكل 3). البس حذاء مع رباط أو حذاء رياضي. لتعديل التطابق، شد أو أرخ حزام دعم القوس.

3. اضبط ضغط خلية الهواء

تكون خلايا الهواء في مشد القدم الهوائي مبدئيًا مفرغًا من الهواء. لنفخ خلايا الهواء، ادخل طرف لمبة اليد مع الأبيض في الصمام على جانب المشد (الشكل 4). اضبط على المنفاخ اليدوي حتى يصبح المشد مرتخي ولكن مريح. في حالة النفخ أكثر من اللازم، فرغ خلايا الهواء من الهواء. لتفريغ الهواء، ادخل الطرف المقابل للمنفاخ اليدوي في الصمام واضغط على المنفاخ.

تنبيه

مثل كل مثبتات الأطراف السفلية، مثل القوالب أو الأقواس، والمرضى دون ضجة كبيرة (أي بعد عملية التخدير، علاج الأعصاب، الخ) ويجب مراقبتها من قبل أخصائي الرعاية الصحية عدة مرات من أجل "النقاط الساخنة"، تهيج الجلد، وإدارة الجروح، أو تلون الجلد. ينبغي أن يستشير المرضى المصابين بأمراض معدية أو تقرحات أخصائي الرعاية الصحية الخاص بهم قبل استخدام المشد. يحدد القانون الفيدرالي بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.

تعليمات التنظيف:

يغسل مشد القدم الهوائي PTTD يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء. لا تسمح للسائل بالدخول إلى الصمام على جانب المشد. كفاءة: بإطار كفاءة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

بدون لاتكس

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، ليس هناك ما يضمن أن استخدام هذا المنتج سيمنع الإصابة.