


Aircast® AirSelect™ Standard

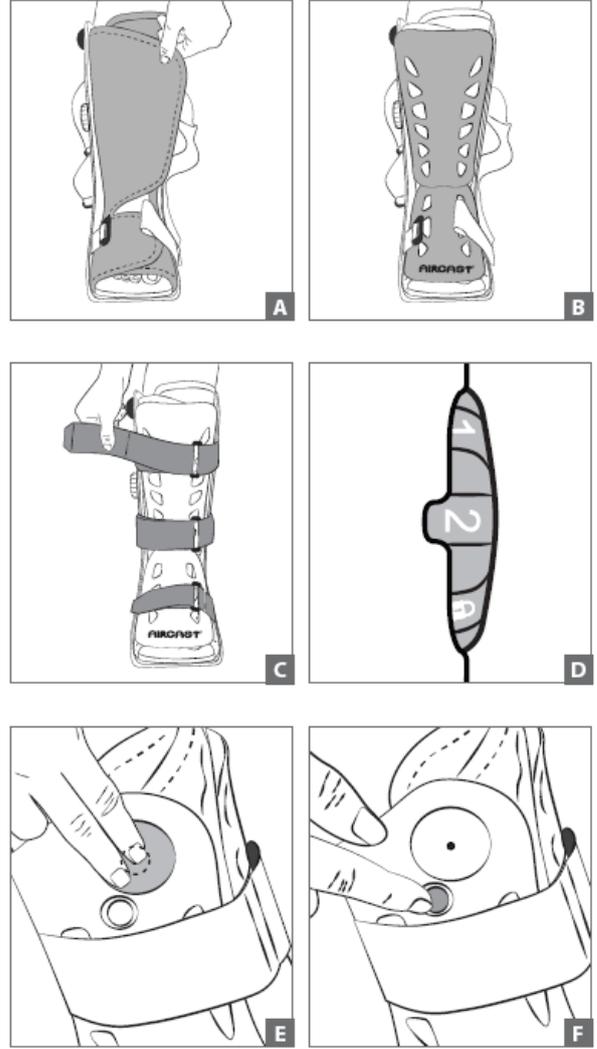

DJO, LLC
A DJO Global Company
Decision Street 1430
USA • Vista, CA 92081-8553
F 760.734.5608 • T 760.727.1280
DJOglobal.com

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال:

مشد المشي STANDARD يوفر دعامة هواء مضغوط لتثبيت كسر القدم و/أو الكاحل، آلام الكاحل الشديدة، الاستخدام بعد العملية الجراحية. إنها ناجعة في التئام الكسور ومعالجة الوذمة (تورم).

تحذيرات واحتياطات:

لا تتبالغ في نفخ الخلايا الهوائية. قد يؤدي نفخ الخلايا الهوائية بشكل غير صحيح لتهيج بالجلد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري (وهي حالة عصبية مرتبطة بالسكري). افحص جلدك بشكل متكرر بحثاً عن "نقاط ساخنة" وتهيج الجلد. إذا رأيت أي تغييرات بالجلد أو شعرت بعدم راحة، خفف ضغط الخلايا الهوائية. لا تستخدم هذا الجهاز إذا كنت لا تشعر بأحاسيس، سواء كان ذلك بسبب التخدير بعد عملية جراحية، حالات عصبية، حالات جلدية أو حالات أخرى.

ينبغي توخي الحذر عند المشي على أسطح زلقة أو رطبة لتجنب الإصابة.

معلومات حول الاستعمال:

استعمال جورب من القطن أو الجبس سيزيد من الراحة - غير مشمول

(1) حضّر الدعامة -

• فك الأحزمة، أبعاد اللوحة الأمامية، وافتح البطانة.

(2) ضع الدعامة -

- أثناء الجلوس، ضع القدم في الدعامة بحيث يكون الكعب تجاه الجزء الخلفي من الدعامة. لف البطانة حول القدم وثم الساق (الشكل أ).
- أرجع اللوحة الأمامية: ضع اللوحة الأمامية بحيث يكون شعار AIRCAST فوق أصابع القدم ويكون الجزء العلوي من اللوحة مغلقًا بإحكام على البطانة (الشكل B).
- أقلل الأحزمة بإحكام من الأسفل للأعلى (الشكل C). شدّها حتى تصبح محكمة ومريحة.

3) اضبط ضغط الخلية الهوائية -

تكون خلايا مشد المشي STANDARD مفرغة من الهواء بشكل مبدئي

- ابدأ النفخ بالجهة المصابة أولاً. لف قرص الاختيار الموجود على الجانب الأيمن من الدعامة حتى الرقم المناسب (الشكل D). رقم 1 ينفخ خلية الهواء على الجانب الأيمن ورقم 2 ينفخ خلية الهواء على الجانب الأيسر. يجب استخدام وضع "إغلاق" عندما تكون كلتا الخليتين الهوائيتين منفوختين. هذا يمنع تفريغ الهواء بشكل غير مقصود.
- لنفخ خلية هوائية، ضع الإصبع على ثقب صغير في أعلى مضخة النفخ الكبيرة الموجودة على الجانب الأيمن العلوي من المشد (الشكل هـ). انفخ بالمضخة حتى تشعر بأن الخلية الهوائية مضغوطة.
- لنفخ خلية الهواء الأخرى، أدر مفتاح SELECTOR إلى الرقم المناسب وثم اضغط وافرغ منافخ النفخ الكبير. انفخ بالمضخة حتى تشعر بأن الخلية الهوائية مضغوطة. عندما يتم نفخ كلتا الخليتين الهوائيتين، أدر مفتاح SELECTOR إلى وضع "إغلاق".
- في حالة الإفراط بالنفخ، أخرج الهواء من الخلايا الهوائية.

4) أخرج الهواء من الخلايا الهوائية -

- لتفريغ الهواء من الخلايا الهوائية، لف قرص الاختيار الموجود على الجانب الأيمن من الدعامة حتى رقم الخلية الهوائية المناسب (الشكل D).
- اضغط واترك الإصبع على زر التحرير الصغير الموجود في أعلى الجانب الأيمن من الدعامة (الشكل F).
- أخرج الهواء حتى يصبح الضغط مريحًا.

ملاحظة: أفرغ الهواء من خلايا الهواء قبل خلع الدعامة من أجل ملائمتها بشكل مناسب عند إعادة استعمالها.

ملاحظة: الضغط العالي يوفر دعمًا أكبر عند المشي، بينما يكون الضغط المنخفض مريحًا أكثر عند الجلوس أو الاستلقاء. كما يمكن تعديل الضغط بواسطة شد أو تحرير الأحزمة.

ملاحظة: يمكن قص الطبقة الخارجية بواسطة منشار الجبيرة أو مقص الجبيرة حتى تتسع بطة الساق الكبيرة.

تعليمات التنظيف:

يمكن غسل بطانة الرغوة باليد بمياه حرارتها 30 درجة مئوية/86 فهرنهايت مع مادة منظفة معتدلة وتجفيفها في الهواء. لا تضعها في النشافة أو تستعمل مصدرًا آخرًا للحرارة لتجفيفها.

الارتفاع العالي:

سوف تتوسع الخلية الهوائية في الارتفاعات العالية فوق مستواها الأمثل. اضبط ضغط الخلية الهوائية من خلال شد أو تحرير الأحزمة.

الكفالة:

بإطار كفالة DJO Global, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي مخصص لاستخدام مريض واحد فقط

المواد

- الغلاف: بولي بروبيلين
- اللوحة الأمامية: بولي إيثيلين بكثافة عالية
- الأحزمة: نايلون
- مضخات النفخ: بولي يورثان ذو لدونة حرارية
- البطانة: نايلون/بولي يورثان/بوليستر (خارجي/رغوة/شبكة داخلية)
- الرباط: بوليستر
- النعل الخارجي / الضبان: EVA/مطاط
- قرص الاختيار: نايلون

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.