


## Air Stirrup Ankle Brace

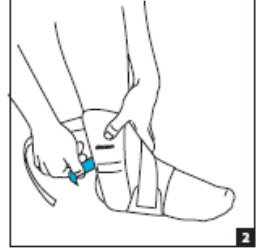

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

### هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

Aircast AirSport™ مصمم ليزود الدعم والحماية للكاحل السليم.

### موانع الاستعمال: غير متوفرة

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

### معلومات حول الاستعمال:

- البس جوربًا.
- فك الأحزمة وافتح الدعامة
- ادخل القدم، إصبع القدم أولًا، في خلف المشد اسحب أجزاء الدعامة الخارجية إلى أعلى بحيث تحاذي جوانب الكاحل
- لفّ حزام أخيل حول الجزء الخلفي من الكاحل واغلقه بشكل محكم ومشدود
- اسحب حزام ATF المتصالب حتى يصبح مشدودًا
- لفّ حول الجزء الخلفي من الكاحل واغلقه بشكل محكم ومشدود البس حذاء مع رباط أو حذاء رياضي

لتعديل المقاس، شدّ أو حرر حزام ATF المتصالب

### تعليمات التنظيف:

يمكن غسل AirSport بكامله بمياه فاترة مع صابون معتدل وتجفيفه بالهواء.

كفالة: باطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط. بدون لاتكس (رمز)

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.