

دعامة Airstrap™



حزام دعم لأسفل الظهر

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- العلاج والوقاية من الألم الحاد أو المزمن في أسفل الظهر.
- الدعم لجميع المنطقة العجزية القطنية (D12/S1)

موانع الاستعمال

- لا توجد

تحذير واحتياطات

المنتج معد لاستخدام مريض واحد فقط. إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستخدام

- 1 – قبل وضع الدعامة الخلفية، انفخها قليلاً بمنفاخ يدوي متحرك. ضع الدعامة الخلفية حول الخصر، احرص على أن تجعلها مثبتة على كلا جانبي العمود الفقري. ضع الدعامة الخلفية وفقاً لمنطقة العمود الفقري التي تحتاج الدعم. يجب وضع صمام النفخ على جانب المريض الأيمن.
- 2 – انفخ الدعامة الخلفية باستخدام منفاخ يدوي قابل للنزع.
 - أ – لإدخال ونزع المنفاخ اليدوي:
 - ارفع صمام النفخ في الدعامة الخلفية وادخل أو انزع المنفاخ اليدوي بإعطائه حركة دورانية.
 - ب – لنفخ الدعامة الخلفية:
 - ادخل الطرف الشفاف من المنفاخ اليدوي في الصمام (ادفعه إلى عميقاً جداً ليسمح بتدفق الهواء). انفخ الدعامة الخلفية للمستوى المطلوب من الراحة.
 - ب – لتفريغ الدعامة الخلفية من الهواء:
 - اعكس وضع المنفاخ اليدوي وادخل الطرف الأسود من المنفاخ اليدوي في الصمام (ادفعه عميقاً جداً ليسمح بخروج الهواء).
- 3 – عندما تكون الدعامة الخلفية منفوخة، اسحب وعدّل الأحزمة الجانبية المطاطية وفقاً لمستوى الراحة المطلوب. فك الأحزمة الجانبية المطاطية قبل نزع الدعامة الخلفية.

العناية

اغسله في مياه فاترة مع مادة منظفة خفيفة. لا تستعمل مواد التبييض. اشطفها جيداً. نشفها في الهواء. لا تجففه في النشافة. لا تنظفه بالتنظيف الجاف. الكي ممنوع.

التركيب

بولي أميد، بوليستر، بوليفينيل كلوريد (PVC)، مطاط، إيلاستين

تحذير: يحتوي هذا المنتج على لاتكس من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب ردود فعل حساسية. مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

كفالة بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.