

مشد الركبة المطاطية المعلقة ALIGUA



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. دلالات الاستعمال

- دعم ما بعد الجراحة بعد إصابة لطيفة في رباط النسيج العضلي الوسطي أو الجانبي أو الإصابة بالعضروف الهلالي
- الدعم والضغط يتبع عدم الثبات الحاد المزمن في الركبة والفصال العظمي اللطيف في الركبة
- التحفيز الذاتي والتحفيز العصبي من خلال الضغط والتنبيت

موانع الاستعمال/الاحتياطات

لا توجد

تعليمات الاستخدام

امسك حواف الكم من الفتحة الأوسع. اسحب الكم فوق الركبة.

تعليمات العناية:

تغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء. نشفها في الهواء. لا تغسله جافًا أو تستعمل معه المبيض.
كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

هذا المنتج مخصص

مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.