

## ברכית אליגואה גמישה עם צירים



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן.  
התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

### התוויות

- תמיכה לאחר ניתוח, בעקבות פציעה קלה של רצועות הברך או פציעה של המניסקוס
- תמיכה ולחץ עקב חוסר יציבות חריפה או כרונית של הברך ודלקת מפרקים ניוונית קלה של הברך
- גירוי פרופריוצפטיבי ונירומוסקולרי באמצעות לחץ וייצוב

### התוויות נגד/אזהרות

אין

### הוראות יישום

אחוז בשולי הברכית, בפתח הגדול יותר. משוך את הברכית על הברך.

### הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לכבס במכונת כביסה או להשתמש בחומר מלבין.

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

### לשימוש המטופל

מיועד לשימוש של מטופל יחיד.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.