


## Arm Sling

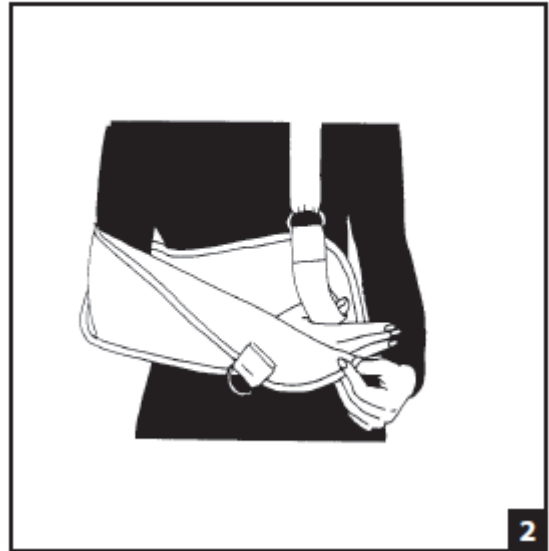

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: تثبيت ودعم مفاصل الذراع، الكتف والكوع.

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات:

إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك. لا تلبس الدعامة أبدًا فوق جرح مفتوح.

معلومات حول الاستعمال:

ملاحظة: يمكن تقصير غطاء حمالة الذراع الجامعة وفقًا للحاجة بواسطة طي الطرف المفتوح داخل نفسه وإغلاق الإبزيم والحلقة بإحكام. استعملها وفقًا لما هو مبين أدناه.

- (1) ضع الكوع في جيب الحمالة. ينبغي دعم المعصم وثلاثة أرباع من اليد داخل الجيب.
- (2) إذا تضمن جيب الحمالة حلقة للإبهام، يمكنك وضع الإبهام في الحلقة للمساعدة في الحفاظ على وضعية الساعد.
- (3) ضع أحزمة الكتف على الكتف المعاكس، أدخل عبر حلقة D وأقل بإحكام. ينبغي أن تكون اليد مرتفعة قليلاً فوق الكوع.

### تعليمات التنظيف:

اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف، واشطف جيداً. ونشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف كلياً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.  
**كفالة:** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.  
**لاستخدام مريض واحد فقط.**

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.