


## מתלה ליד

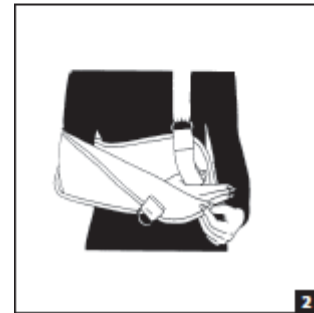

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: מניעת תזוזה של מפרקי האמה, הכתף והמרפק, ותמיכה בהם.

התוויות נגד: אין

אזהרות:

אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי. לעולם אין להשתמש במתלה על פצע פתוח.

הוראות יישום:

הערה: מתלה היד הוא אחיד. אם המעטפת שלו ארוכה מדי, ניתן לקצרה. לשם כך יש לקפל את הצד הפתוח לתוך עצמו ולסגור את סוגרי הצמדן. השתמש במתלה כמתואר להלן.

- 1) הכנס את המרפק לכיס המתלה. שורש כף היד ו-3/4 מכף היד אמורים להימצא בתוך הכיס.
- 2) אם לכיס המתלה יש לולאה לאגודל, הכנסת האגודל לתוכה תעזור לשמור על מיקום האמה.
- 3) הנח את רצועת הכתף על הכתף הנגדית, השחל אותה דרך הטבעת בצורת D, וסגור אותה. גובה כף היד צריך להיות מעט מעל גובה המרפק.

הוראות ניקוי:

יש לכבס את הריפוד ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.