

Bodystrap™ 26



חגורת גב

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

• כאבי גם תחתון חריפים או כרוניים.

התוויות נגד

• אין
• להשגת התועלת המרבית יש לבחור בקפידה את המידה המתאימה ולכוון את כנפי המשיכה הצדדיות למידת הלחץ הרצויה.

אזהרות

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

- 1) מקם את החגורה סביב המותניים וסגור באמצעות הצמדן.
- 2) משוך את הרצועות הצדדיות הגמישות עד שתשיג את רמת הלחץ הרצויה, והצמד אותן על קדמת החגורה באמצעות לשוניות הצמדן.

הוראות ניקוי

יש לכבס במים פושרים עם סבון כביסה עדין. אין להשתמש בחומר מלבין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

הרכב

פוליאמיד, פוליאסטר, PVC, גומי, אלסטון, פלדה

זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס טבעי העלול לגרום לתגובות אלרגיות.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.