

طوق الرقبة California Cervical Collar



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: الحد من تقوس العمود الفقري العنقي والتمدد والاستدارة لتشجع المريض على الشفاء.

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

(1) بعد اختيار الحجم الصحيح، استخدم الجزء الخلفي من الطوق إلى خلف رقبة المريض.

يجب أن يكون جزء من الطوق مثبت في المركز ويجب أن يكون السهم الأمامي للأعلى.

(2) طابق الجزء الأمامي من الطوق من الناحية الأمامية لرقبة المريض مع جعل الذقن مثبتة في وضع مريح. ثبت الطوق لتتأكد من أن الأربطة في الوضع العادي. تتشابك القطعة الأمامية من طوق العنق مع القطعة الخلفية للطوق.

(3) لتثبيت الطوق، احضر الأحزمة من القطعة

الخلفية حول القطعة الأمامية. يتم إنجاز التثبيت والراحة من خلال مراقبة التعديل المزدوج للأحزمة.

(4) في الحقيقة، من المتاح لبس جوارب النايلون النسائية على اللوحة الأمامية والخلفية للطوق للحصول على راحة إضافية للمريض.

تعليمات التنظيف: اغسله باليد بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف. اشطفها جيداً. وجفها في الهواء.

بشكل منفصل.

لاستخدام مريض واحد فقط.

خالٍ من اللاتكس

كفالة: باطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، ليس هناك ما يضمن أن استخدام هذا المنتج سيعمنع الإصابة.