
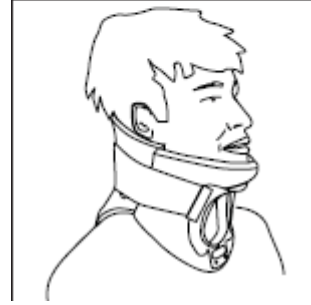


צווארון קליפורניה

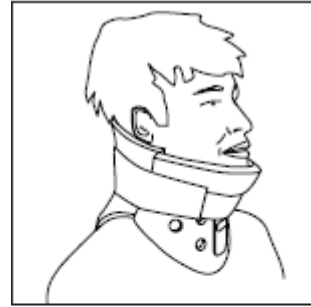

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות: מגביל פלקסיה, אקסטנציה ורוטציה של עמוד השדרה הצווארי ומשפר את החלמת המטופל. **התוויות נגד:** אין

אזהרות: אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

הוראות יישום:

(1) בחר את המידה המתאימה והנח את החלק **האחורי** של הצווארון על עורפו של המטופל.

יש למרכז את הצווארון. החץ מלפנים צריך להצביע כלפי מעלה.

(2) הנח את החלק **הקדמי** של הצווארון בקדמת צווארו של המטופל, כאשר הסנטר ממוקם היטב בשקע.

מרכז את הצווארון וודא שהמנח ניטרלי. החלק **הקדמי** של הצווארון צריך לחפוף לחלק **האחורי** של הצווארון.

(3) כדי לסגור את הצווארון העבר את הרצועות מהחלק **האחורי** סביב החלק **הקדמי**.

כדי לשפר את הנוחות ומניעת התזוזה יש לכוון את הרצועות משני הצדדים, בכל פעם קצת.

(4) במקרה הצורך ניתן לשפר את נוחות המטופל בהנחת שרוול כותנה על חלקו הקדמי והאחורי של הצווארון.

הוראות ניקוי: יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר בנפרד.

מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.

נטול לטקס

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.