

ذكر / Conforstrap™ Homme
أنثى / Conforstrap™ Femme



حزام دعم لأسفل الظهر

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- العلاج والوقاية من الألم أسفل الظهر الحاد أو المزمن.

موانع الاستعمال

- لا توجد
- للحصول على أكبر كفاءة ممكنة، تأكد من اختيار الحجم المناسب.

تحذير واحتياطات

المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستخدام

ضع الحزام حول محيط الخصر وأغلقه باستخدام إغلاق التلامس. يتم تسليم الدعامة الخلفية مع جيب من النسيج وكمامة ساخنة/باردة قابلة للاستخدام مرة أخرى.

الكمامة الساخنة/الباردة - تعليمات الاستعمال

الهدف من الاستعمال: كمامة علاجية للاستخدام مع الألام والتورم والكدمات المعروفة.

توجيهات لاستخدام العلاج بالبرد.

1. ضع ضمادة الجّل في آلة التجميد الخاصة بك لمدة ساعة واحدة على الأقل.
 2. اخرج ضمادة الجّل من آلة التجميد الخاصة بك.
 - ضع ضمادة الجّل في الجيب النسيجي المتّقلّ المستلم مع جيب الدعامة.
 - ضع الجيب النسيجي الذي يحتوي على الضمادة على الجزء الداخلي من جيب الدعامة، على المنطقة المطلوب معالجتها.
 - ثبت الجيب النسيجي والضمادة باستخدام حزام الحلقة والعروة الموجود على خارج الجيب النسيجي.
- افحص دائماً من أجل مستوى راحتك الشخصية. إذا كانت باردة جداً، انزعها وانتظر حتى تصبح الحرارة مقبولة.
3. بعد الاستخدام، خزن كمامة الجّل في حرارة الغرفة.

توجيهات لاستخدام العلاج بالبرد

(يعتمد على ميكرويف قوته 1200 واط)

لا تسخن الجيب النسيجي في الميكرويف

1. يجب أن تكون درجة حرارة الكمامة الجّل نفس درجة حرارة الغرفة قبل استخدام الميكرويف.
 2. ضع كمامة الجّل في الميكرويف. سخنها بطاقة كاملة لمدة 45 ثانية.
 3. اخرجها من الميكرويف وتفحصها لتحصل على درجة الحرارة المطلوبة. (ستستمر درجة الحرارة بالارتفاع).
 4. إذا كان مطلوب درجة حرارة إضافية، أعدّها للميكرويف وسخنها لمدة 10 ثواني إضافية. قد يسبب التسخين الزائد تمزق وتسرب كمامة الجّل.
 5. اخرج ضمادة الجّل من الميكرويف.
 - ضع ضمادة الجّل في الجيب النسيجي المتّقلّ المستلم مع جيب الدعامة.
 - ضع الجيب النسيجي الذي يحتوي على الضمادة على الجزء الداخلي من جيب الدعامة، على المنطقة المطلوب معالجتها.
 - ثبت الجيب النسيجي والضمادة باستخدام حزام الحلقة والعروة الموجود على خارج الجيب النسيجي.
- بعد ساعة واحدة، يمكن تسخين كمامة الجّل مرة أخرى لمدة 45 ثانية.

تنبيه

لتجنب التقرح، يجب أن لا تزيد مدة العلاج بالبرد عن 20 دقيقة في كل مرة. راقب كمامة الجّل أثناء التسخين. إذا بدأت كمامة الجّل بالتمدد، أطفأ الميكرويف.

لا تستخدم كمامة الجّل بشكل مباشر على الجلد أو على الجلد المصاب. استخدمها فقط كأنها مباشرة.

يجب ان يستشير الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية الطبيب قبل استخدام هذا المنتج. لا تستخدم المنتج مع مسكنات الألم الموضعية أو المراهم.

هذا المنتج غير سام، ومع ذلك، ليس مخصص للأكل. إذا تتطلب الأمر حرارة إضافية، انتظر ساعة واحدة وسخن كمامة الجّل مرة أخرى. قد يسبب التسخين الزائد تمزق وتسرب كمامة الجّل. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

العناية

اغسله في مياه فاترة مع مادة منظفة خفيفة. لا تستعمل مواد التبييض. اشطفها جيداً. نشفها في الهواء. لا تجففه في النشافة. لا تنظفه بالتنظيف الجاف. الكي ممنوع.

التركيب

بولي أميد، بوليستر، بوليفينيل كلوريد (PVC)، إيلاستين، فولاذ

بدون لاتكس



مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

كفالة بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة سنة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: بينما تم بذل كل الجهود في مجال التقنيات الفنية للحصول على أقصى قدر من التطابق الوظيفي والقوة والمتانة والراحة، وليس هناك ما يضمن بأنه سيتم وقاية الإصابة باستخدام هذا المنتج.