

# Conforstrap™ לגבר Conforstrap™ לאישה



חגורת גב

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

## שימוש מיועד/התוויות

- טיפול במתנת (לומבגו) חריפה וכרונית ומניעתה.

## התוויות נגד

- אין
- להשגת התועלת המרבית יש לבחור בקפידה את המידה המתאימה.

## אזהרות

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

## הוראות יישום

מקם את החגורה סביב המותניים וסגור באמצעות הצמדן. לחגורת הגב מצורפים כיס נשלף מאריג רשת וקרחום לשימוש חוזר.

## הוראות שימוש לקרחום

שימוש מיועד: קרחום טיפולי לשימוש במקרים שכיחים של כאבים למיניהם, נפיחות ושטף דם.

### הוראות שימוש לטיפול בקור

1. הכנס כרית ג'ל למקפיא למשך שעה אחת לפחות.
2. הוצא את כרית הג'ל מהמקפיא.
- הכנס את הכרית לכיס האריג הנשלף שצורף לחגורת הגב.
- מקם את כיס האריג שבתוכו הכרית על החלק הפנימי של חגורת הגב, באזור הזקוק לטיפול.
- קבע את כיס האריג והכרית באמצעות רצועת צמדן הנמצאת בצדו הפנימי של כיס האריג.
3. בדוק תמיד את רמת הנוחות האישית שלך. אם הכרית קרה מדי, הסר אותה והמתן עד שהטמפרטורה תהיה נוחה לך.
3. לאחר השימוש יש לאחסן את כרית הג'ל בחום החדר.

### הוראות שימוש לטיפול בחום

(מתייחס למיקרוגל בעוצמה של 1,200 ואט)

#### אין לחמם את כיס האריג במיקרוגל

1. כרית הג'ל חייבת להיות בחום החדר לפני החימום במיקרוגל.
  2. הכנס את כרית הג'ל למיקרוגל כשהיא שטוחה. חמם בעוצמה מלאה במשך 45 שניות.
  3. הוצא את הכרית מהמיקרוגל ובדוק אם היא חמה במידה הרצויה. (החום ימשיך לעלות במקצת).
  4. אם נחוץ חימום נוסף, החזר אותה למיקרוגל וחמם בכל פעם עוד 10 שניות. חימום מוגזם עלול לגרום לכרית הג'ל להתבקע ולנזול.
  5. • הוצא את כרית הג'ל מהמיקרוגל.
  - הכנס את הכרית לכיס האריג הנשלף שצורף לחגורת הגב.
  - מקם את כיס האריג שבתוכו הכרית על החלק הפנימי של חגורת הגב, באזור הזקוק לטיפול.
  - קבע את כיס האריג והכרית באמצעות רצועת צמדן הנמצאת בצדו הפנימי של כיס האריג.
- לאחר שעה ניתן לחמם מחדש את כרית הג'ל במשך 45 שניות.

### זהירות

כדי למנוע כוויות קור, אין להשאיר את הקרחום יותר מ-20 דקות בכל פעם. יש להסתכל על כרית הג'ל בעת חימומה. אם כרית הג'ל מתחילה להתנפח יש לכבות את המיקרוגל. אין להניח כרית ג'ל ישירות על העור או על עור פצוע. יש להשתמש רק לפי ההוראות. אנשים עם בעיות בזרימת הדם צריכים להתייעץ עם הרופא לפני השימוש במוצר זה. אין להשתמש במוצר זה עם כל תרופה מקומית או משחות לשיכוך כאבים. מוצר זה אינו רעיל. עם זאת, הוא אינו מיועד לאכילה. אם כרית הג'ל אינה מספיק חמה, יש להמתין שעה לפני חימומה מחדש. חימום מוגזם עלול לגרום לכרית הג'ל להתבקע ולנזול. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

### הוראות ניקוי

יש לכבס במים פושרים עם סבון כביסה עדין. אין להשתמש בחומר מלבין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

### הרכב

פוליאמיד, פוליאסטר, PVC, אלסטן, פלדה

### נטול לטקס

#### מיועד לשימוש של מטופל יחיד

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.