

# Condilax

CONDILAX ELASTIC ELBOW



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

## هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- دعم بأعقاب التهاب مفصل الكوع (كوع التنس)
- انضغاط وتخفيف الألم بحالة التهاب مفصل الكوع
- انضغاط بعد عملية جراحية بالكوع

## موانع الاستعمال

- لا توجد

## تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

## تعليمات الاستخدام

- (1) اسحب الكم على الذراع بحيث تكون الفتحة الأكبر أولاً. ضع الكم بحيث يغطي المنطقة المصابة كما هو مبين (الصورة 1).

## العناية

تغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء. نشفها في الهواء. لا تغسله جافًا أو تستعمل معه المبيض.

## بدون لاتكس



## مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

الكفالة بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.