


مشد الركبة Defiance® AC L, PCL, CI

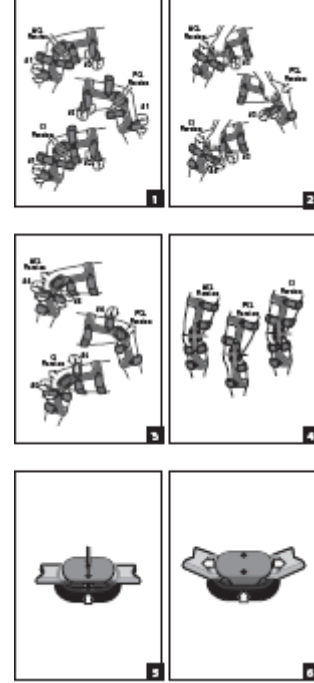

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

دواعي الاستعمال: حالات العجز في الرباط الصليبي الأمامي، الرباط الصليبي الخلفي، العجز في الرباط الصليبي الأمامي/الرباط الصليبي الخلفي • عمليات إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، الرباط الصليبي الخلفي، إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي/الرباط الصليبي الخلفي • حالات العجز في الرباط الصليبي الجانبي • حالات العجز في الرباط الصليبي الجانبي مع الرباط الصليبي الخلفي • إلتواءات الرباط الجانبي الإنسي و/أو الرباط الوحشي الجانبي

- التمدد الزائد

لقد تم تصميم هذا المنتج لتكملة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للآلام المذكورة أعلاه. يجب تحديد وتيرة ومدة الاستخدام من خلال وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

موانع الاستعمال: لا يوجد

معلومات حول الاستعمال:

- (A) عند الجلوس على حافة الكرسي، أخطو مستخدمًا المشد.
- اثن الركبة 45 درجة، وضع المشد كما هو مبين في الشكل 1، وثبت العالقة في المركز حول رقم 1" (2.54سم) فوق أعلى صابونة الركبة وقليلًا بعد خط وسط الساق. تحقق من أن المشد غير ملتوي حول الساق.
- (B) ثبت حزام بطة الساق السفلي (الحزام رقم 1#)، ثم حزام الفخذ العلوي (الحزام رقم 2#).
- (C) حافظ على الركبة مثنية 45 درجة، وادفع كلا اللقم (العلاقات) نحو ظهر الساق، كما هو مبين في الشكل 2.
- (D) د: حافظ على وضع العلاقات: لتعديل الرباط الصليبي الأمامي، ثبت حزام الفخذ السفلي (3#)، لتعديل الرباط الصليبي الخلفي، ثبت حزام بطة الساق العلوي (3#)، لتعديل CI، ثبت حزام الفخذ العلوي (3#) ثم حزام بطة الساق العلوي (4#) على ظهر الساق.
- (E) لتعديل الرباط الصليبي الخلفي، اسحب العلاقات للأمام قليلاً قبل ربط حزام قصبية الساق الأمامي (عظم الساق الأكبر) (4#). للحصول على نسخة PCL المعدلة اسحب العلاقات للأمام قليلاً قبل ربط شريط الفخذ الأمامي (4#). للحصول على نسخة CI المعدلة اسحب العلاقات للأمام قليلاً قبل ربط شريط قصبية الساق الأمامي (عظم الساق الأكبر) (5#) وشريط الفخذ الأمامي (6#). لا تسحب المفصلات بعد الخط المنصف للساق
- (و) و: لتعديل الرباط الصليبي الأمامي التالي، ثبت حزام بطة الساق العلوي (5#). احرص على عدم سحب هذا الحزام بقوة مما يسبب خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية.

(ز) عندما يكتمل ربط جميع الأحزمة، يجب أن تكون العالقات مركزة فقط فوق أعلى صابونة الركبة وقليلًا بعد الخط المنصف للساق. لضمان عدم حدوث انزلاق خلال النشاط، يوصى بالقيام بقليل من عمليات ثني الركبة أو المشي لمدة دقائق قليلة، ومن ثم إعادة شد الأحزمة متبعًا الخطوات من ب إلى و أو من ب إلى ه للحصول على نسخة CI المعدلة.

تعليمات لتعديل المفصلة

يأتي المشد الخاص بك مع توقيفات مثبتة تصل إلى امتداد 10 درجات. لتغيير التوقيفات المثبتة، أولاً انزع البرغي تمامًا كما هو مبين في (الشكل 5).

ثم انزع التوقيفات. ادخل التوقيفات الجديدة، حاذي مع الثقوب في حزام المفصلة، ثم أعد إدخال البرغي. مفك فيليبس مصلب، وتحقق من أن البراغي موضوعة في التجاويف ومربوطة تمامًا. يجب أن يكون كل من التوقف الوسطي والجانبى متطابقين في الدرجة.

غطاء درع العالقات الجانبية الشرائحية (العادي أو DEFIANCE).

لنزع توقف الامتداد، من الضروري تثبيت المفصلة وإخراج غطاء الدرع قبل نزع التوقف (الشكل 6).

توقيفات الامتداد: 0 درجة، 10 درجة، 20 درجة، 30 درجة و40 درجة.

توقيفات الانحناء: 0 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 75 درجة و90 درجة (لا يوجد توقيفات انحناء مثبتة على شحنة السلع)

الاستعمال والعناية

- إذا كان من الضروري إعادة الربط أثناء النشاط، أعد ربط جميع الأحزمة متبعًا الخطوات في تعليمات الاستعمال.
- قد يتم تشذيب جميع الأحزمة وسنادات التثبيت لتتلاءم مع الفروق الفردية في محيط الأطراف.
- قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في النشاطات المائية، جففه كليًا واشطفه بماء نظيف وماء عذب وثم جففه في الهواء.
- اغسل بطانات وسنادات تثبيت اللقمة الخاصة بك يدويًا في ماء بارد مع مطهر لطيف. يجفف في الهواء فقط، لا تسخن البطانات أو سنادات تثبيت اللقمة الجافة.
- تطلب آلية العلاقة قليل من الصيانة في الوضع العادي. ومع ذلك، قد تستخدم مواد التشحيم الجافة مثل رذاذ Teflon™
- للآلية الداخلية للمفصلة. يوصى بمواد التشحيم الجافة بعد الاستخدام في الماء.
- تفقد براغي العلاقة للربط وإعادة الشد حسب الحاجة بشكل متكرر.

استشر طبيبك أو المُعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالدعامة.

تحذير: ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي في المجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام العام غير الخاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

كفالة: بموجب كفالة DJO، LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر وسنة واحدة على إطار المشد/المفصلات من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد فقط.

RX فقط

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تحذير: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.