


مشد مفصلات الركبة DELUXE HINGED KNEE

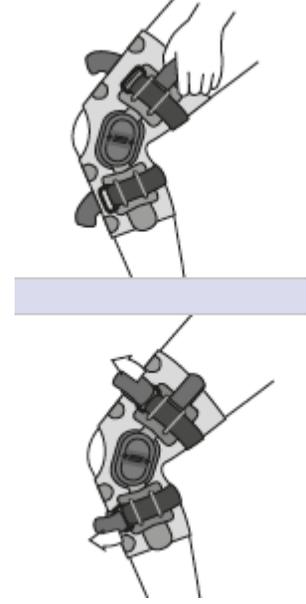

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبنمغن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- الدعم لكسر حدة ألم الرباط الإنسي للرسغ الخفيف و/أو عدم الاستقرار في الرباط الوحشي الجانبي
- عدم الاستقرار الكلي الخفيف
- بعد عملية استئصال المفصل

موانع الاستعمال

- يرجى الانتباه بأن DJO و LLC لا توصي بلبس مشدات الركبة الوظيفية بشكل ثنائي (الساقين الأيمن والأيسر) في وقت واحد، أثناء النشاطات (أي التزلج) فقد يسبب ذلك ملامسة المشدات لبعضهما البعض، مما ينتج عنه فقدان محتمل للسيطرة ويسبب الإصابة. لا يوصى بلبس مشدات الركبة الوظيفية فوق الملابس.

تحذير واحتياطات

إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

تعليمات الاستخدام

فك وأرخ أحزمة الفخذ وبطة الساق.

- (1) بناءً على موديل المنتج الذي تختاره، إما أن تسحب المشد على الساق أو تلف المشد حول الساق واربطة فوق الساق من الأمام. ضع الكم بحيث تكون العلائقات موازية لبعضها البعض، والجزء العلوي من الشق الدائري محاذاً مع الجزء العلوي من صابونة الركبة.
- (2) اربط أحزمة الدعامة على الفخذ وبطة الساق.

العناية

اغسل باليد بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف، واشطف جيداً. ونشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام، واشطفه تماماً بماء نظيف وماء عذب. ونشفها في الهواء. تطلب آلية العلائقة قليل من الصيانة في الوضع العادي. ومع ذلك، قد تستخدم مواد التشحيم الجافة مثل رذاذ Teflon® للآلية الداخلية للمفصلة. يوصى بمواد التشحيم الجافة بعد الاستخدام في الماء. تفقد براغي المفصلة للربط وإعادة الشد حسب الحاجة بشكل متكرر.

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي



مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

كفالة بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.