


## ברכית עם צירים DELUXE

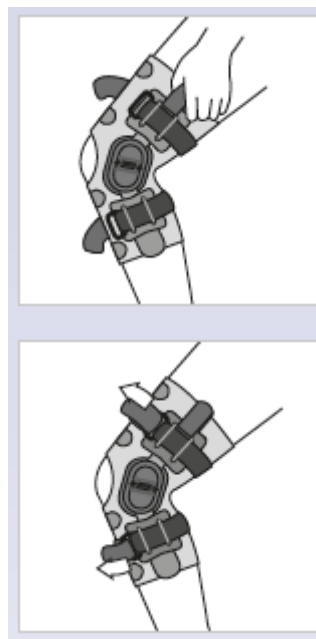

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

### שימוש מיועד/התוויות

- ברכית למקרים של חוסר יציבות קלה עד בינונית של הרצועה הקולטרלית האמצעית (MCL) ו/או הרצועה הקולטרלית הצדית (LCL)
- חוסר יציבות כללית קלה
- לאחר כריתת מניסקוס בארתרוסקופיה

### התוויות נגד

- לתשומת לבך, חברת DJO, LLC אינה ממליצה להשתמש בברכיות תפקודיות על שני הצדדים (רגל ימין ורגל שמאל) במהלך פעילויות (כמו סקי) העלולות לגרום לברכיות לגעת זו בזו, ולגרום לאובדן שליטה ולפגיעה אפשריים. לא מומלץ להשתמש בברכיות תפקודיות מעל בגדים.

### אזהרות

אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

### הוראות יישום

התר ושחרר את רצועות הירך והשוק.

- (1) משוך את הברכית על הרגל או כרוך אותה סביב הרגל וסגור בקדמת הרגל, בהתאם לגרסת האביזר שברשותך. מקם את הברכית כך שהצירים יקבילו זה לזה, והחלק העליון של הפתח העגול יקביל לחלק העליון של הפיקה.
- (2) הדק את רצועות התמיכה בירך ובשוק.

### הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים פושרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר. ניתן להשתמש באביזר במים מתוקים או מלוחים. לאחר השימוש יש לנקז היטב ולשטוף במים מתוקים נקיים. יש לייבש באוויר.

בשימוש רגיל נחוצה תחזוקה מועטה של מנגנון הציר. עם זאת, ניתן ליישם על המנגנון הפנימי של הציר אבקת סיכה כמו תרסיס Teflon®. מומלץ להשתמש באבקת סיכה לאחר שימוש במים. יש לערוך בדיקה תקופתית של מידת ההידוק של בורגי הצירים, ולהדק אותם שוב במידת הצורך.

לא מיוצר עם גומי לטקס טבעי

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.