

تعليمات استعمال

قبل استخدام المشد، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن.
الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الدعامة بشكل سليم.

دلائل الاستعمال: • تغيير وضع العصب الزندي • كسور مستقرة برأس الكعبرة • انخلاع الكوع
تثبيت بعد عملية جراحية لإصلاح الوتر.

أ استخدم الأداة المساعدة المزودة، فك البراغي الموجودة في القضبان المفصليّة المثقوبة بحيث تنزلق الهياكل بحرية على
القضبان المفصليّة. (الشكل 1)



Figure 1

ب ضع الذراع داخل الدعامة، بحيث تكون المفصلات مستوية مع اللقيمة (النتوء في طرف العظم) وعدّل (بالانزلاق) الهياكل على
طول القضبان المفصليّة لتناسب مكان طول الذراع الصحيح. شدّ البراغي لإغلاق الهياكل بإحكام على تركيب القضيب المفصلي. (الشكل
2)

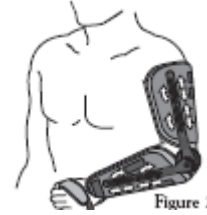


Figure 2

ت لوضع المفصلة في مكان أمامي أكثر، استخدم الأداة المساعدة لإزالة البراغي الموجودة في القضبان المفصليّة المثقوبة وأدخل
القضبان المفصليّة في ثقب الهيكل الأمامية. أرجع البراغي وشدها لإغلاق الهياكل بإحكام على تركيب القضيب المفصلي.

ث أغلق بإحكام غطاء محيط الساعد ومن ثم أحزمة الذراع العليا. (الشكل 3)

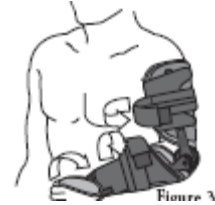


Figure 3

ج حمالة دعم

أبسط الحمالة. قم بوصل أحد أطراف الحمالة عبر الأحزمة العضدية بزواوية صغيرة.
لف الحمالة حول الرقبة وتحت قطعة الساعد. أرجع الحزام للخلف على نفسه على الجانب غير المشارك وأغلق بإحكام.

الشكل 1

الشكل 2

الشكل 3 تعليمات ضبط المفصلة

ح إعدادات المفصلة: تعديلات المسمار محددة بزيادات 30°. (الشكل 4)



Figure 4

خ لتغيير إعدادات ROM (النطاق الذي من خلاله يتم طي المفصل ومدّه)، استعمل مفتاح ألن المزود لإزالة البراغي.

حرّك المكان المرغوب واحكم الاغلاق من جديد.
(الشكل 5)



الشكل 4

الشكل 5 الاستعمال والعناية

- اغسل البطانة باليد دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيّداً. ونشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيّداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.
- لتجنب تضرر المفصلة، يجب أن تكون إعدادات الثني متطابقة بالجهتين وأن تكون إعدادات التمديد متطابقة بالجهتين.

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعم نيويرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة لالتهاب الجلد أو حساسية لنيويرين.

تحذير: ينبغي استعمال هذا المنتج تحت إشراف أخصائي بالمجال الطبي. هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام عام غير خاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تحذير: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من ممارس مهنة طبية مرخص.