

הוראות יישום ל-Deluxe ROM למרפק

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה הוראות אלה במלואן.
התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

התוויות: • שיכול העצב האולנרי • שבר יציב בראש עצם הרדיוס • נקע של המרפק
• מניעת תזוזה לאחר ניתוח בעקבות ניתוחים לתיקון גידים.

א באמצעות המפתח המצורף שחרר את הברגים הנמצאים על הזרועות המחוברות של
הציר, כך שהחלקים הקשיחים יחליקו בחופשיות על זרועות הציר. (תרשים 1)



Figure 1

תרשים 1

ב הכנס את היד לתוך הסד תוך מיקום הצירים מול האפיקונדילים, וכוונן (החלק) את
החלקים הקשיחים לאורך זרועות הציר כך שיתאימו לאורך ולמיקום הנכונים של היד. הדק
את הברגים והצמד את החלקים הקשיחים למכלל זרוע הציר. (תרשים 2)

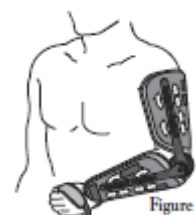


Figure 2

תרשים 2

ג כדי למקם ציר בעמדה קדמית יותר, פתח במפתח את הברגים הנמצאים בזרועות
המחוברות של הציר והוצא אותם. לאחר מכן מקם את זרועות הציר בתוך החורים הקדמיים
של החלק הקשיח. הכנס חזרה את הברגים והדק אותם, כדי להצמיד את החלקים הקשיחים
למכלל זרוע הציר.

ד סגור את הרצועה סביב האמה ואחריה את הרצועות סביב הזרוע. (תרשים 3)



Figure 3

תרשים 3

ה מתלה תומך

פתח את המתלה. חבר קצה אחד של המתלה לרוחב רצועות הזרוע בזווית קלה.
העבר את המתלה סביב הצוואר ומתחת לחלק של האמה. קפל את הרצועה חזרה על עצמה
בצד הבריא וסגור.

תרשים 3 הוראות לכוונן הציר

1 כוונן הציר: פני הכוונן קבועים במרווחים של 30° . (תרשים 4)



תרשים 4

2 כדי לשנות את כוונן טווח התנועה פתח את הברגים במפתח אלן המצורף. הזז למיקום הרצוי והברג חזרה את הברגים. (תרשים 5)



תרשים 5

שימוש וניקוי

- יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.
- כדי למנוע נזק לצירים, כוונן הכיפוף בשני הצדדים חייב להיות זהה וכוונן היישור בשני הצדדים חייב להיות זהה.

אזהרה: לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה בפיקוח של איש צוות רפואי. האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, אביזר זה הוא רק גורם אחד בתכנית הטיפול הכוללת שקבע איש הצוות הרפואי. אין ערבות לכך שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה. זהירות: על פי החוק הפדרלי (ארה"ב), מכירת אביזר זה מותרת רק על-ידי איש צוות רפואי מורשה או בהוראתו.