


# دعامة الرسغ Deluxe

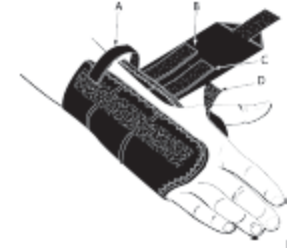

1



2



3

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتعمن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

## هدف الاستعمال/دلالتل الاستعمال

- دعامة للمصابين بأعراض النفق الرسغي
- تثبيت الرسغ.

## موانع الاستعمال

- لا توجد

## تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

## تعليمات الاستخدام

- (1) ضع اليد في الجبيرة مع إبقائها محاذية للذراع والإبهام بوضع مرتاح في الفتحة الجانبية.
  - (2) أرفق الأحزمة على التوالي أ، ب، ج و د. وأثناء الاستعمال استخدم الشد المستمر للحزام المطاطي، ولفها واربطها.
  - (3) لف الحزام الثابت حول الرسغ وثبته.
- ملاحظة: يجب أن تتطابق الدعامة بشكل مريح ولكن ليس للدرجة التي تقيد فيها الدورة الدموية في اليد.

### العناية

اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيّدًا. يجفّف في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيّدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

### بدون لاتكس



### مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

**كفالة** بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.