



תומך Deluxe לשורש כף היד

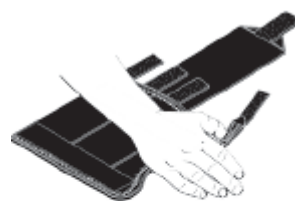

1

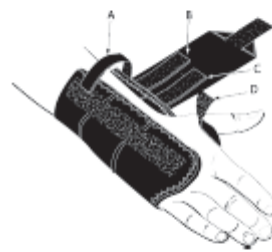

2



3

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

- תמיכה במקרים של תסמונת התעלה הקרפלית
- מניעת תזוזה של שורש כף היד

התוויות נגד

- אין

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

- (1) הנח את היד בתומך כאשר הפס הנוקשה מקביל לאמה והאגודל מונח בחריץ הצדדי.
 - (2) סגור את הרצועות בסדר הבא: א', ב', ג' ו-ד'. בעת היישום שמור על מתח קבוע ברצועה הגמישה, כרוך אותה וסגור אותה.
 - (3) כרוך את רצועת הייצוב סביב שורש כף היד וסגור אותה.
- הערה: התומך צריך להיות צמוד בנוחות, אך לא במידה שתגביל את זרימת הדם לכף היד.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. הערה: יש לשטוף את האביזר היטב, אחרת שאריות הסבון עלולות לגרום לגירוי ולהתפוררות החומר.

נטול לטקס

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.