


DonJoy Functional Wrist Lacer

DonJoy Functional Wrist Lacer

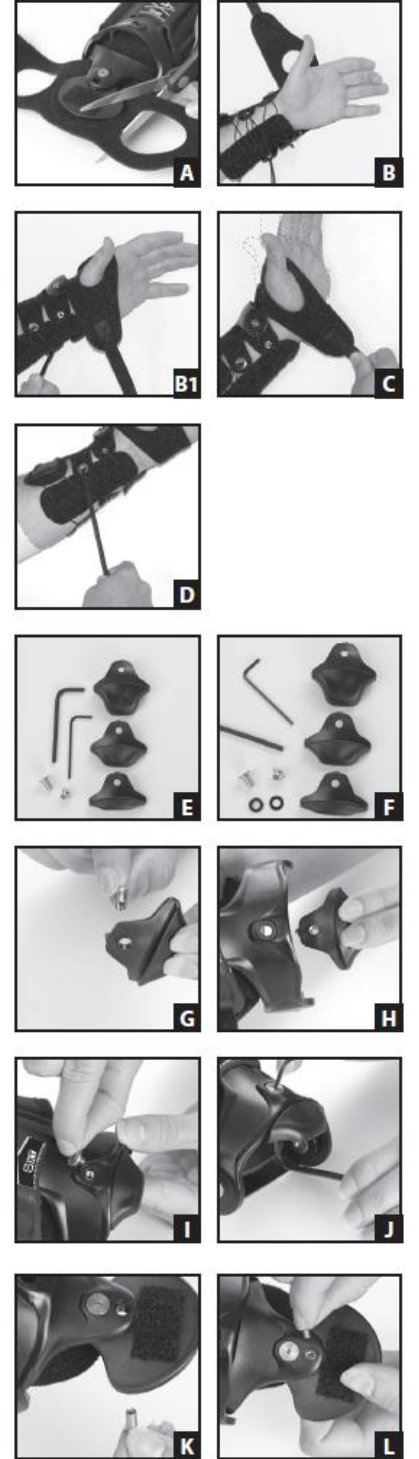

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: تقويم للتأهيل بعد كسور وتقويم بعد إصابة.
موانع الاستعمال: كسر غير مستقر

تحذيرات واحتياطات:

معصم DonJoy SXT/CXT عبارة عن دعامة فقط، وهي غير مخصصة أو مكفولة لمنع إصابة. يوافق المشتري على ما يلي:

- LLC، DJO لا تتحمل أية مسؤولية عن أي ضرر قد يحدث أثناء استخدام منتجات DonJoy SXT/CXT لدعم المعصم.
- عند استخدام أداة من هذا النوع، من المحتمل ظهور تهيج بالجلد بأنواع مختلفة، بما في ذلك الطفح الجلدي ونقاط الضغط. إذا عانيت من أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر أخصائي الرعاية الطبية على الفور.

معلومات حول الاستعمال:

1. بطانة اليد شاملة وينبغي قصها لتلائم الإبهام الأيمن أو الإبهام الأيسر. قصّ حلقة الإبهام الإضافية. ملاحظة: انتبه حتى لا تقصّ حلقة الإبهام الخاطئة (انظر الشكل A).
2. حرّر الحزام وأدخل المعصم لداخل الدعامة (انظر الشكل B). ضع الإبهام داخل الحلقة على بطانة اليد. أغلق الرباط بشكل خفيف (انظر الشكل B1).
3. بينما يكون المعصم داخل الوصلة، لفّ حزام حلقة الإبهام حول راحة اليد وأغلقه بإحكام على الرقعة التي يظهر اليد. قصّ قطعة الحزام الزائدة (انظر الشكل C).
4. الدعامة التي يتم وضعها بشكل صحيح تكون شديدة ومحكمة. شدّ الأحزمة مرة أخرى حسب الضرورة (انظر الشكل D).

نهايات الوصلة:

DonJoy Functional Wrist مزود بنهاية وصلة بزاوية 60 درجة مبنية داخل الهيكل. إذا كنت بحاجة إلى وضع مختلف، استخدم واحدة من بين 3 نهايات وصلة مشمولة (انظر الشكل SXT للنموذج E والشكل F للنموذج CXT). قم بوصل النهاية المطلوبة بالهيكل مستعملاً عزقة الربط، البرغي وحلقة إحكام الربط المشمولين. ينفذ ذلك على النحو التالي:

1. قم باختيار نهاية الوصلة المطلوبة.
2. ادفع عزقة الربط (الأسطوانة الأطول) عبر الثقب في نهاية الوصلة على الجانب السفلي من الدعامة (انظر الشكل G). ضع الثقب الذي بنهاية الوصلة بمحاذاة الثقب المثقوب مسبقاً في هيكل الدعامة (انظر الشكل H).
3. ملاحظة: في حالة استخدام النموذج CXT، ضع حلقة إحكام الربط على رأس البرغي.
4. أدخل البرغي في طرف العزقة (انظر الشكل I).
4. استخدم مفتاح هيكس الأكبر للحفاظ على عزقة الربط في مكانها، شدّ البرغي باستخدام مفتاح هيكس الأصغر (انظر الشكل J). عندما يتم التركيب بشكل صحيح، ينبغي أن يكون ترتيب الأجزاء (من الأعلى إلى الأسفل) كما يلي: برغي، حلقة إحكام الربط (CXT فقط)، هيكل الدعامة، نهاية الوصلة وعزقة الربط.

نهاية كعبرية/زندية

لإعداد النهاية الكعبرية/الزندية ادفع عزقة الربط من الأسفل (انظر الشكل K) وأدخل البرغي من أعلى (انظر الشكل L). في حالة استخدام CXT ستكون هناك حلقة إحكام الربط بين عزقة الربط والبرغي.

تعليمات التنظيف:

يمكن تنظيف المنتجات باليد باستخدام صابون معتدل وماء دافئ. نشفها بقطعة قماش. ممنوع إدخال المنتج للغسالة أو النشافة.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

لاستخدام مريض واحد

بدون لانتكس

US Patent #'s 7,402,148 and 7,708,709

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.