


DORSAL NIGHT SPLINT

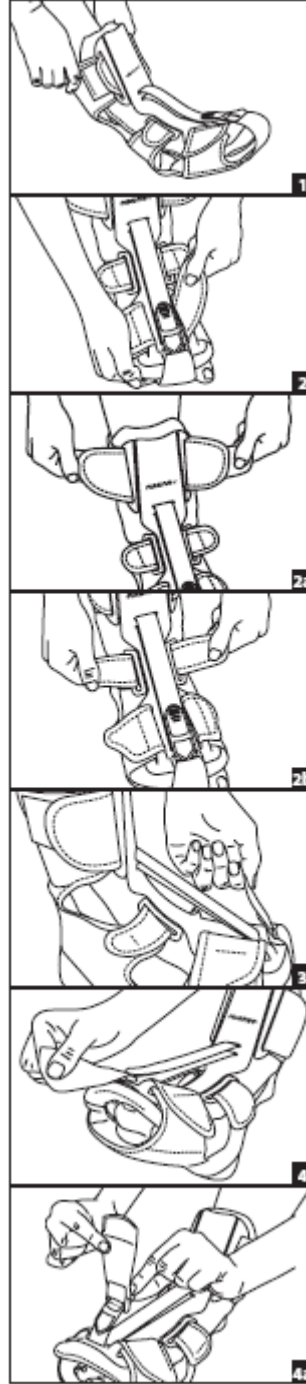

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبعناية. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.
هدف الاستعمال/دلالات الاستعمال: تساعد على تخفيف الألم المرتبط بالتهاب اللقافة الأخمصية.

موانع الاستعمال: هذا المنتج غير معدّ لمريض في حالة تحمّل وزن أو التمشي اليومي، أو للمرضى الذين يعانون من حساسية لمادة النيوبرين.

تحذيرات واحتياطات: هذا المنتج غير مخصص لاستخدام عام غير خاضع للرقابة. إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

ينبغي وضع الجبيرة بينما يكون المريض جالساً.
يمكن ارتداء جورب على القدمين من أجل راحة إضافية.

الإعداد:

- أ. تأكد من وضع الجبيرة بحيث يكون "الجانب الأيمن للأعلى" - تشير "الأصابع" على الغلاف إلى المكان حيث يتم وضع القدم ويجب وضع المادة غير القابلة للانزلاق بالأسفل، تحت القدم الأمامية.
- ب. حرر كل الأحزمة بما في ذلك حزام سحب التثني الظهر في الجزء الأمامي من الجبيرة. يوصى بلبس الدعامة مثل جورب. فكّ كل الأحزمة دون السحب عبر حلقات D. تثبت أطراف الحزام في أطول نقطة للخلف على نفسها.

وضع الجبيرة:

- 1) أدخل القدم في الجبيرة وكأنك تلبس جورباً. تأكد من أن أصابع القدم وكرة القدم في وضعية مريحة داخل قسم القدم الأمامية في الجبيرة وأن الكعب جالس بشكل مريح داخل المنطقة المرسومة.
- 2) بعد أن تكون القدم بوضع مريح داخل الجبيرة، أغلق بإحكام أحزمة القدم الأمامية أولاً ومن ثم أحزمة بطّة الساق (a2). بعد ذلك، وإذا لزم الأمر، شدّ الأحزمة الوسطى (b2). ينبغي أن تكون الأحزمة مشدودة، ولكن ألا أضيق مما يجب. لا تشدّ الأحزمة أكثر مما يجب.
- 3) من أجل شدّ اللفافة الأخمصية بشكل إضافي، اسحب حزام تعديل التثني الظهر حتى الحصول على مقدار الشدّ المرغوب.
- 4) يوجد في الجبيرة حزام لأصبع القدم وظيفته جعل الملائمة مشدودة أكثر، "ضغط" أصابع القدم بشكل مريح في الجبيرة. يمكن إزالة هذا الحزام بسهولة، إذا رغبت بذلك (a4).

ملاحظة: لتسهيل المشي، فكّ حزام التثني الظهر.

الاستعمال والعناية

تعليمات التنظيف: يمكن إزالة البطانة وغسلها باليد بصابون خفيف وماء بارد.

اشطفها جيداً. ونشفها في الهواء.

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعامات من نيوبرين

من قبل أفراد لديهم قابلية

معروفة لالتهاب الجلد أو حساسية

لمنتجات مشتقة من نيوبرين.

لاستخدام مريض واحد فقط.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو جودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.