


# מגף דורסלי ללילה

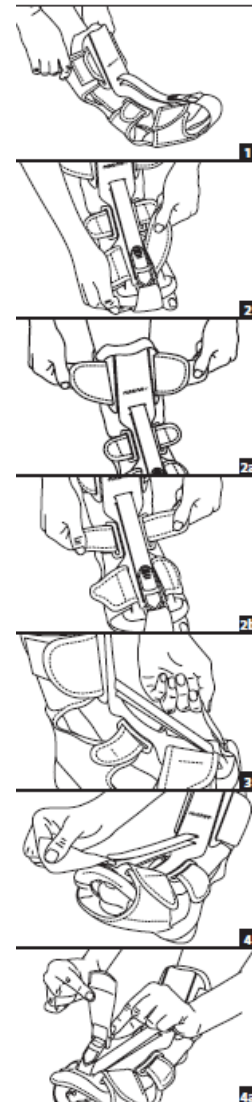

**לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקיין.**

**שימוש מיועד/התוויות:** עוזר לשכך כאב הקשור לדלקת החיתולית הפלנטרית.  
**התוויות נגד:** מוצר זה אינו מיועד למטופל במצב של נשיאת משקל או לניידות יומיומית, או למטופלים האלרגיים לניאופרן.  
**אזהרות:** האביזר אינו מיועד לשימוש ציבורי ללא פיקוח. אם אתה מרגיש כאב, נפיחות, שינויים בתחושה או תגובות חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר זה, התייעץ מיד עם איש הצוות הרפואי.

## **הוראות יישום:**

יש לנעול את המגף בישיבה.  
לתוספת נוחות, ניתן לגרוב גרב על כף הרגל.

## **הכנה:**

א. ודא שצדו ה"ימני" של המגף פונה כלפי מעלה - ה"אצבעות" על החלק הקשיח מראות את מיקום כף הרגל ואת החומר המחוספס יש למקם בתחתית, מתחת לקדמת כף הרגל.

ב. שחרר את כל הרצועות, כולל את רצועת המשיכה של הדורזיפלקסיה הנמצאת בקדמת המגף. מומלץ לנעול את המגף כמו שגורבים גרב. שחרר את כל הרצועות בלי להוציא אותן מתוך הטבעות בצורת D. סגור את הרצועות חזרה על עצמן והדק את קצותיהן בנקודה הארוכה ביותר.

## **יישום המגף:**

1) החלק את כף הרגל לתוך המגף, כמו שגורבים גרב. ודא שהאצבעות וכרית כף הרגל ממוקמים בנוחות בתוך החלק במגף המיועד לקדמת כף הרגל, ושהקב ממוקם בנוחות בתוך הפתח המיועד לעקב.  
2) כאשר כף הרגל ממוקמת בנוחות במגף, סגור קודם את הרצועות של קדמת כף הרגל ואז את רצועות השוק (א2).  
לאחר מכן, במידת הצורך, הדק את הרצועות המרכזיות (א2). הרצועות צריכות להיות מהודקות, אך לא יתר על המידה. אין להדק את הרצועות יתר על המידה.

3) למתיחה נוספת של החיתולית הפלנטרית, משוך את הרצועה לכוון הדורזיפלקסיה עד השגת מידת המתיחה הרצויה.

4) למגף יש רצועה לכוון המשמשת להתאמה נוחה יותר, כך שהאצבעות יושבות צמודות בנוחות במגף.

במקרה הצורך, ניתן להוריד בקלות את הרצועות (א4).

הערה: כדי להקל על הניידות, יש לשחרר את רצועת הדורזיפלקסיה.

#### **שימוש וניקוי**

**הוראות ניקוי:** את הריפוד יש להוציא ולכבס ביד במים עם סבון כביסה עדין. יש לשתוף היטב. יש לייבש באוויר.  
**אזהרה:** לאנשים עם רגישות ידועה לתוצרי לוואי של ניאופרן, אשר כתוצאה מכך מתפתחת אצלם דלקת עור או אלרגיה, אסור להשתמש בתמיכות מניאופרן.

#### **מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד.**

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

**לתשומת לבך:** למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.