

مشد Economy Hinged Knee

تعليمات الاستخدام

قبل استخدام المشد، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمعن.

الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الدعامة بشكل سليم.


دواعي الاستعمال: • تخفيف التواءات الرباط الإنسي للرسغ و/أو الرباط الوحشي الجانبي • تخفيف ألم الروماتيزم • بعد عملية استئصال المفصل • تخفيف عدم الاستقرار الكلي.

A فك وأرخ أحزمة الفخذ وبطة الساق.


B امسك حواف الكم واسحبها على الساق. إذا كنت تستخدم نسخة اللف الدائري، لفة حول الساق واربطه فوق الساق من الأمام. ضع الكم بحيث تكون العلاقات موازية لبعضها البعض، والجزء العلوي من الشق الدائري محايد مع الجزء العلوي من صابونة الركبة.

C اربط أحزمة الدعامة على الفخذ وبطة الساق.

لف حول

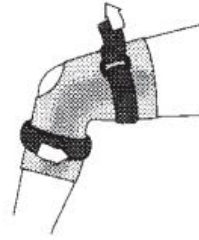

الركبة المعلقة

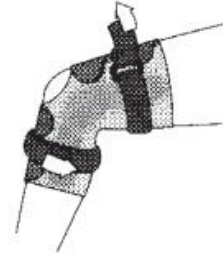

E النزع

للنزع، فك الأحزمة واستخدم الضغط للأسفل لأعلى الكم عند العلاقات.

الاستعمال والعناية

- اغسل البطانة باليد بمياه دافئة باستخدام صابون معتدل، واشطف جيداً. ونشفها في الهواء.
- قد يتم نزع العلاقات للغسيل. **ملاحظة:** إذا لم يشطف جيداً، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

• قد يستخدم المشد في الماء العذب أو المالح. بعد الاستخدام في النشاطات المائية، جففه جيّدًا واشطفه بماء نظيف وماء عذب. ونشفها في الهواء.
كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

تحذير: ينبغي عدم استخدام دعامات مصنوعة من نيوبرين من قبل أفراد لديهم قابلية معروفة للإصابة بالتهاب الجلد أو حساسية لمنتجات مشتقة من نيوبرين.

لف حول الركبة المعلقة
تنبيه: يرجى الانتباه بأن **dj Orthopedics** و **LLC** لا توصي بلبس مشدات الركبة الوظيفية بشكل ثنائي (الساقين الأيمن والأيسر) في وقت واحد، أثناء النشاطات (أي التزلج) فقد يسبب ذلك ملامسة المشدات لبعضهما البعض، مما ينتج عنه فقدان محتمل للسيطرة ويسبب الإصابة.

لا يوصى بلبس مشدات الركبة الوظيفية فوق الملابس. استشر أخصائي الرعاية الصحية المرخص من أجل تحديدات النشاط.

تحذير: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.