



دعامة منطقة أسفل الظهر - البطن

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلالتل الاستعمال

- وقاية وعلاج لآلام أسفل الظهر الحادة أو المزمنة.
- يوصى به خصيصاً للمرضى الذين بحاجة لدعامة البطن (المرضى أصحاب الوزن الثقيل أو المرضى الذين يعانون من فتاق في البطن أو ضعف العضلات).

موانع الاستعمال

- الحمل.
 - تأكد من اختيار الحجم المناسب واضبط أشرطة الشد الجانبية حتى تحصل على الضغط المطلوب.
- المنتج معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستخدام

1. أطلق الأشرطة الجانبية المطاطية.
2. ضع الحزام حول خط الخصر، واضعاً إياها فوق منطقة أسفل الظهر العجزية للمريض. أغلق الحزام باستخدام سدادات الاتصال.
3. شد الأشرطة الجانبية المطاطية للمستوى الذي ترغب به وثبتها على الدعامة من الأمام باستخدام سدادات الاتصال.

العناية

اغسله في مياه فاترة مع مادة منظفة خفيفة. لا تستعمل مواد التبييض. اشطفها جيداً. نشفها في الهواء. لا تجففه في النشافة. لا تنظفه بالتنظيف الجاف. الكي ممنوع.

التركيب

بولي أميد، بوليستر، بوليفينيل كلوريد (PVC)، مطاط، إيلاستين، فولاذ

تحذير: يحتوي هذا المنتج على لاتكس من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب ردود فعل حساسية.

مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط



كفالة بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.