

# Duostrap™



חגורת גב ובטן

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

## שימוש מיועד/התוויות

- מניעה וטיפול בכאבי גב תחתון חריפים או כרוניים.
- מותווה במיוחד למטופלים הזקוקים לתמיכה של הבטן (מטופלים עם משקל יתר או מטופלים הסובלים מבקע בטני או חולשה של שרירי הבטן).

## התוויות נגד

- היריון.
- הקפד לבחור את המידה המתאימה ולכוונן את כנפי המשיכה הצדדיות להשגת מידת הלחץ הרצויה.

המוצר מיועד לשימוש של מטופל יחיד בלבד. אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

## הוראות יישום

1. שחרר את רצועות המשיכה הגמישות הצדדיות.
2. הנח את החגורה סביב קו המותניים, תוך מיקומה מעל אזור העצה והמותן של המטופל. סגור את החגורה באמצעות הצמדן.
3. משוך את הרצועות הצדדיות הגמישות עד שתשיג את רמת הלחץ הרצויה, והצמד אותן על קדמת החגורה באמצעות הצמדן.

## הוראות ניקוי

יש לכבס במים פושרים עם סבון כביסה עדין. אין להשתמש בחומר מלבין. יש לשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לייבש במייבש כביסה. אין לנקות בניקוי יבש. אין לגהץ.

**הרכב**  
פוליאמיד, פוליאסטר, PVC, גומי, אלסטן, פלדה

**זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס טבעי העלול לגרום לתגובות אלרגיות.  
מיועד לשימוש של מטופל יחיד**

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.