
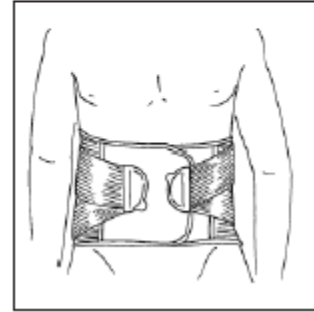
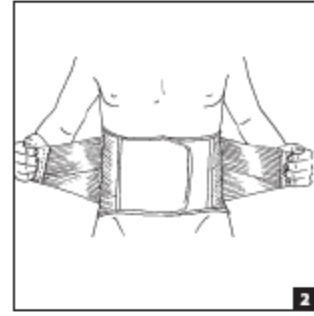


مشد الظهر Dynastrap

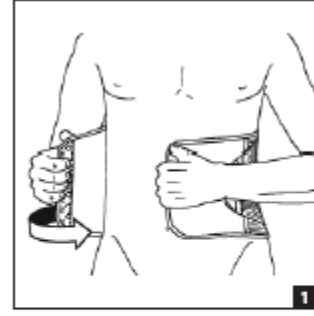

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

العلاج والوقاية من الألم أسفل الظهر الحاد أو المزمن.

موانع الاستعمال:

من أجل أكبر نجاعة ممكنة، تأكد من اختيار المقاس المناسب واضبط أشرطة الشد الجانبية حتى الحصول على الضغط المطلوب.

تعليمات الاستخدام

- (1) ضع الحزام حول محيط الخصر وأغلقه باستخدام إغلاق التلامس.
- (2) اسحب أشرطة الشد المرنة الجانبية حتى مستوى الضغط المطلوب وأصقها على الجزء الأمامي من الحزام باستخدام لصاقات إغلاق التلامس.

تعليمات العناية

تغسل يدويًا في ماء بارد مع صابون لطيف ويجفف بالهواء. نشفها في الهواء. لا تغسله جافًا أو تستعمل معه المبيض.

المكونات: 26% لاتكس - 23% بولي أميد - 19% مونوفيلامينت - 12% بوليستر - 13% PVC قطن

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

تحذير لاتكس نقاط اتصال لاتكس

هذا المنتج مخصص

مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.