
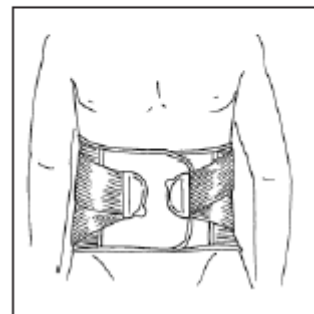
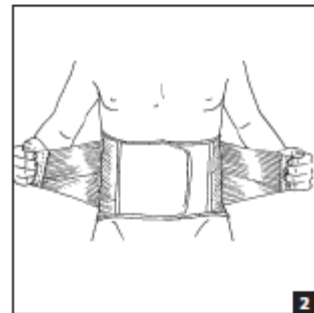


# Dynastrap

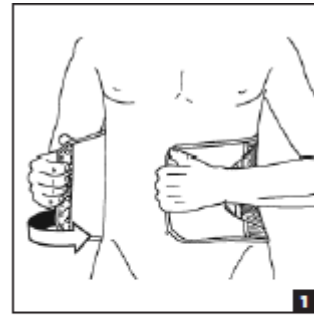

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

## שימוש מיועד/התוויות

טיפול במתנת (לומבגו) חריפה וכרונית ומניעתה.

## התוויות נגד - זהירות

להשגת התועלת המרבית יש לבחור בקפידה את המידה המתאימה ולכוון את כנפי המשיכה הצדדיות למידת הלחץ הרצויה.

## הוראות יישום

(1) מקם את החגורה סביב המותניים וסגור באמצעות הצמדן.

(2) משוך את הרצועות הצדדיות הגמישות עד שתשיג את רמת הלחץ הרצויה, והצמד אותן על קדמת החגורה באמצעות לשוניות הצמדן.

## הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולשטוף היטב. יש לייבש באוויר. אין לכבס במכונת כביסה או להשתמש בחומר מלבין.

**הרכב:** 26% לטקס - 23% פוליאמיד - 19% מונופילמנט [GM1] - 12% פוליאסטר - 13%  
7% PVC כותנה

**אחריות:** חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

**אזהרת לטקס: מכיל לטקס**

**לשימוש המטופל**

**מיועד לשימוש של מטופל יחיד.**

**לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.**