


# دعامة الظهر المطاطية ELASTIC BACK SUPPORT

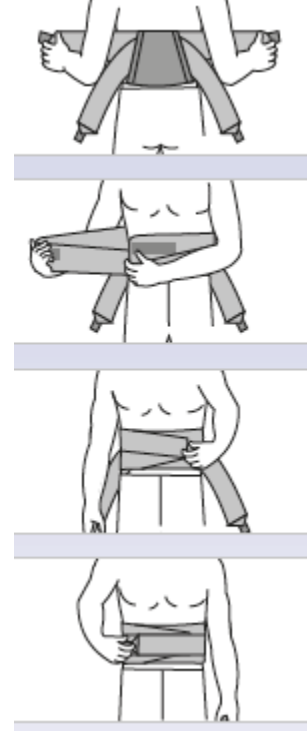

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

## هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- تثبيت ودعم منطقة أسفل الظهر بسبب ألم أسفل الظهر الحاد وما يتبعه من ألم، عرق النساء أو بعد الإصابة.

## موانع الاستعمال

- لا توجد

## تحذير واحتياطات

إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغييرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور المهني الطبي الذي يعالجك. لا تلبس الدعامة أبدًا فوق جرح مفتوح.

## تعليمات الاستخدام

- (1) ضعها في المركز خلف الظهر. ضعها بحيث تكون سنادة العمود الفقري السفلية في منطقة أسفل الظهر أو جزء صغير من الجزء الضعيف من الظهر. ملاحظة: يمكن لبس قميص قصير الأكمام تحت الدعامة. ستقلل الملابس الثقيلة من الفعالية.
- (2) امسك كل نهاية للدعامة (بادئًا بالأحزمة الداخلية) واسحب باتجاه الأمام. عند الحصول على ارتخاء قليل، ابدأ بالجانب الأيسر ولف الدعامة باتجاه البطن. ثبت الوضع.
- (3) اسحب الجانب الأيمن للأمام واربطه بالجانب الأيسر مع السدادات الحساسة للضغط.
- (4) كرر الخطوات 2-3 مع الأحزمة الخارجية.

## العناية

اغسل باليد بمياه دافئة باستخدام صابون خفيف، واشطف جيدًا. ونشفها في الهواء. ملاحظة: إذا لم يشطف جيدًا، قد يسبب الصابون المتبقي التهيج وتلف المواد.

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي



**مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط**

**كفالة** باطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.