

™ EpiForce

DONJOY

EpiForce™



DJO
GLOBAL



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

يجب أن يكون المستخدم قادرًا على ما يلي:

- اقرأ وافهم التعليمات، التنبيهات والتحذيرات

دعم للكوع مع حشوات سيليكون للقيمة (نتوء في طرف العظم) للدعم والضغط

الميزات

- تساعد حشوات السيليكون على تخفيف الضغط عن عضلات الكوع
- حزام قابل للإزالة لضبط مستوى الضغط
- منطقة ارتياح في غضن الكوع من أجل راحة اللبس
- نسيج بتكليف شكله للمبنى التشريحي بثلاثة أبعاد لتوفير ضغط مريح ومنظم
- مادة صالحة للتنفس

دلالات الاستعمال

- التهاب مزمن، ما بعد صدمة أو عملية جراحية بالأنسجة الرخوة في مفصل الكوع
- كوع تنس (التهاب اللقيمة الجانبي)
- كوع لاعب غولف (التهاب اللقيمة الأوسط)
- فصال عظمي خفيف
- التهاب المفاصل الروماتويدي
- التهاب كيسي

موانع الاستعمال

ينبغي استخدام الدعامة فقط بعد استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

- أمراض جلدية وإصابات في المنطقة المصابة (مثل تغيرات جلدية متعلقة بالحساسية، تهيج، ندبات مع تورم، احمرار، ارتفاع حرارة الجسم)
- اضطرابات لمفاوية، تورم النسيج الرخو بشكل غير واضح في المنطقة المصابة
- اضطرابات بالدورة الدموية أو اضطرابات حسية في المنطقة المصابة

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستعمال

1. لف للأسفل حافة الدعامة الزرقاء حتى تصل حشوة السيليكون.

2. بينما تمسك حشوة السيليكون الوسطى (داخلية)، اسحب الدعامة على الذراع والكوع.

تأكد من أن الثقب الصغير في حشوة السيليكون الجانبية (خارجية) موجودة على اللقيمة الجانبية. تأكد من أن شعار Donjoy موجه إلى الأمام.

3. إذا لزم الأمر، اربط الحزام القابل للإزالة بالقطعة المخملية الصغيرة على الجزء الأمامي من الدعامة ولفه حول الساعد. سوف يوفر الحزام ضغطًا إضافيًا عندما تنقل العضلات. تجنب شد الحزام أكثر مما يجب وحرره على الفور إذا شعرت بأنه ضيق للغاية.

نصيحة: عند استخدام الحزام القابل للإزالة، تجنب التلامس المباشر بين إبزيم وحلقة الحزام والدعامة المنسوجة، لأن ذلك سيتلف الجانب المرني للنسيج.

تعليمات الاستخدام

- إذا قمت بلبس الدعامة مباشرة على الجلد، ينبغي أن يكون الجلد خاليًا من الإصابات، الرطوبة، الزيوت، الكريمات، الجل أو بقايا مواد مشابهة عند استخدام الدعامة.
- ينبغي عدم لبس الدعامة لأكثر من 8 ساعات في اليوم.
- مع الاستخدام السليم ومراعاة كل التعليمات، لن تظهر نقاط ضغط.
- لن يتحمل المنتج أية مسؤولية عن أي تغييرات في المنتج أو عن استخدام غير صحيح.

العناية

- ينبغي غسلها باليد في مياه فاترة (30 درجة مئوية) مع مادة منظفة معتدلة
- نشؤها في الهواء (لا تضعها على مشعاعات/سخانات أو غيرها من مصادر الحرارة)
- لا تستخدم مواد التبييض أو الكلور، الكي ممنوع.

التركيب

- المواد المنسوجة: مادة البولي أميد، إيلاستين، بوليستر، لاتكس من المطاط الطبيعي
- الحشوة: سيليكون
- الغلاف الداخلي: قماش تيري
- الحزام: بولي أميد

تحذير: يحتوي هذا المنتج على لاتكس من المطاط الطبيعي الذي قد يسبب ردود فعل حساسية معدً للاستخدام على مريض واحد بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة سنة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.