



לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

הפרופיל של המשתמש המיועד

המשתמש חייב להיות מסוגל:

- לקרוא ולהבין את ההוראות, האזהרות ואמצעי הזהירות מרפקית עם כריות סיליקון לתמיכה באפיקונדיל והפעלת לחץ עליו

תכונות

- כריות סיליקון העוזרות להקל את הלחץ על שרירי המרפק
- רצועה ניידת לכוונון רמת הלחץ
- אזור נוחות בקפל המרפק ההופך את השימוש נוח יותר
- סריג בעל התאמה תלת-ממדית לקווי המתאר האנטומיים מספק לחץ נוח ואחיד
- חומר נושם

התוויות

- דלקת כרונית, לאחר טראומה או לאחר ניתוח של הרקמה הרכה במפרק המרפק
- מרפק טניס (דלקת באפיקונדיל הצדדי)
- מרפק גולף (דלקת באפיקונדיל האמצעי)
- דלקת מפרקים ניוונית קלה
- דלקת מפרקים שגרונית
- דלקת האמתחת (בורסיטיס)

התוויות נגד

יש להשתמש במרפקית רק לאחר התייעצות עם איש צוות רפואי, עם הופעת התסמינים הבאים:

- מחלות עור ופגיעות בעור באזור הנגוע (לדוגמה, שינויים בעור עקב אלרגיה, גירויים, צלקות עם נפיחות, אדמומיות, היפרתרמיה)

- הפרעות לימפתיות, נפיחות בלתי מובחנת ברקמה הרכה באזור הפגוע

- הפרעות במחזור הדם או הפרעות תחושה באזור הפגוע

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

1. גלגל למטה את הגבול העליון הכחול של המרפקית עד כריות הסיליקון.

2. תוך החזקת כרית הסיליקון האמצעית (הפנימית) משוך את המרפקית מעל לאמה ולמרפק.

ודא שהחור הקטן בכרית הסיליקון הצדדית (החיצונית) יימצא מעל האפיקונדיל הצדדי. ודא שהלוגו Donjoy יפנה קדימה.

3. במקרה הצורך, חבר את הרצועה הנשלפת לחתיכת בד הוולור הקטנה הנמצאת בקדמת המרפקית וכרוך אותה סביב האמה. הרצועה מספקת תוספת לחץ כאשר השרירים מכווצים. הימנע מהידוק מוגזם של הרצועה. אם אתה חש שהלחץ מוגזם, שחרר אותה מיד.

המלצה: בעת שימוש ברצועה נשלפת יש להימנע ממגע ישיר בין הצמדן של הרצועה לבין המרפקית הסרוגה, מכיוון שמגע כזה יפגע במראה של הסריג.

הוראות שימוש

- אסור להניח את המרפקית ישירות על העור אם יש עליו פצעים, לחות, שמנים, קרמים, ג'לים או שיירים דומים.

- אין לעטות את המרפקית במשך יותר מ-8 שעות ביממה.

- בשימוש נכון והקפדה על כל ההוראות לא אמורות להופיע נקודות לחץ.

- היצרן לא יישא באחריות לכל שינוי במוצר או לשימוש לא נכון.

הוראות ניקוי

- יש לכבס ביד במים קרים (30°C) עם סבון כביסה עדין.

- יש לייבש באוויר (אין להניח על רדיאטור/תנור חימום או על מקור חום אחר)

- אין להשתמש במלבין או בכלור. אין לגהץ.

הרכב

- סריג: פוליאמיד, אלסטין, פוליאסטר, גומי לטקס טבעי

- כרית: סיליקון

- כיסוי פנימי: אריג מגבת

- רצועה: פוליאמיד

זהירות: מוצר זה מכיל גומי לטקס טבעי העלול לגרום לתגובות אלרגיות

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.
לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.