
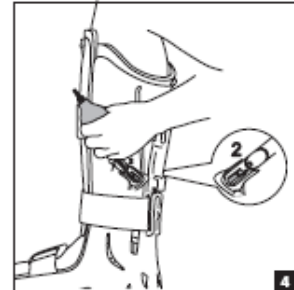
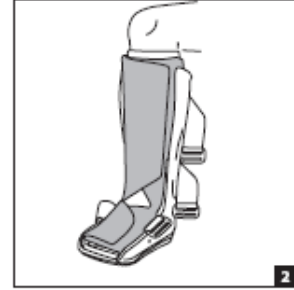


FP Walker Foam Pneumatic

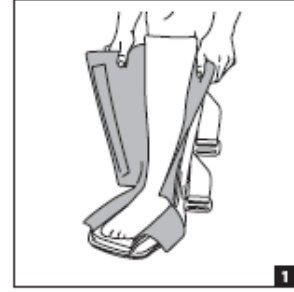

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم. هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: توفر دعامة المشي الهوائية دعمًا هوائيًا لكسر ثابت في القدم و/أو الكاحل، لالتواء شديد في الكاحل، وللاستخدام ما بعد عملية جراحية.

إنها ناجعة في التئام الكسور ومعالجة الوذمة.

موانع الاستعمال: لا ينطبق

تحذيرات/احتياطات:

يحدد القانون الفيدرالي بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.

لا تبالغ في نفخ الخلايا الهوائية. قد يسبب النفخ غير الصحيح للخلايا الهوائية تمزق شديد في الجلد لدى المرضى المصابين بالاعتلال العصبي السكري. تخفيض ضغط خلايا الهواء عند ظهور أي تغيرات في الجلد أو الشعور بعدم الارتياح. لا تستخدم هذا الجهاز للمرضى العاجزين عن التواصل الجسدي غير المريح.

كما هو الحال مع جميع الأجهزة التي تثبت الأطراف السفلية، مثل جبيرة أو دعامة، ينبغي الإشراف على المرضى الذين بدون إحساس (مثل تخدير بعد عملية جراحية، اعتلال عصبي وما شابه) بشكل متكرر بحثًا عن "نقاط ساخنة"، تهيج الجلد أو معالجة الجروح.

ينبغي توخي الحذر عند المشي على أسطح زلقة أو رطبة لتجنب الإصابة. سوف تتوسع الخلايا الهوائية في الارتفاعات العالية فوق مستواها الأمثل. اضبط ضغط الخلية الهوائية من خلال شد أو تحرير الأحزمة. **معلومات حول الاستعمال:** (ليس جورب من القطن أو الجبس سيزيد من الراحة - غير مشمول)

1. حضّر الدعامة -

فك الأحزمة، أبعّد اللوحة الأمامية، وافتح البطانة.

2. ضع الدعامة

أثناء الجلوس، ضع القدم في الدعامة. ضع الكعب في الجزء الخلفي من الدعامة واسحب البطانة للأمام للتخلص من أي تجاعيد (الشكل 1). لفّ البطانة حول القدم ومن ثمّ الساق، ملّس التجاعيد وأقلّ بإحكام (الشكل 2). أرجع اللوحة الأمامية لمكانها. أقلّ الأحزمة بإحكام من الأسفل للأعلى (الشكل 3). شدّها حتى تصبح محكمة ومريحة.

3. قم بضبط الضغط في الخلية الهوائية

الخلايا الهوائية بدعامة المشي FP تكون في البداية فارغة من الهواء. لنفخ الخلايا الهوائية، ضع الصمامات في الجزء الخلفي من الدعامة بجوار الكاحل. أدخل بحزم رأس النفخ (inflate) بالأداة اليدوية في الصمام الموجود نحو داخل الساق واضغط حتى تشعر بأن الخلية الهوائية مشدودة (الشكل 4).

كرر استخدام الصمام نحو الجزء الخارجي من الساق.

في حالة الإفراط بالنفخ، أخرج الهواء من الخلايا الهوائية. لإخراج الهواء من الخلايا الهوائية، أدخل رأس التفريغ (deflate) بالأداة اليدوية في الصمام واضغط حتى يصبح الضغط مريحاً.

يوفر الضغط العالي دعماً أكبر عند المشي، بينما يكون الضغط المنخفض مريحاً أكثر عند الجلوس أو الاستلقاء. (كما يمكن تعديل الضغط بواسطة شد أو تحرير الأحزمة).

الاستعمال والعناية:

يمكن غسل بطانة الرغوة باليد بمياه

باردة مع مادة منظفة معتدلة وتجفيفها في الهواء. لا

تستعمل هذا الجهاز على مرضى لا يمكنهم

التعبير عن عدم الارتياح.

كفالة: بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

مخصص لاستخدام مريض واحد.

RX فقط

بدون لاتكس

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تحذير: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز من قبل أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص.