


FlexiForm Wrist FlexiForm Poignet

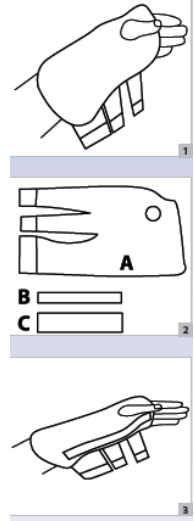

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- التواء في المعصم، إجهاد واصابات.
- قبل/بعد عملية جراحية لتثبيت المعصم.

موانع الاستعمال

- لا توجد

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستخدام

- A – دعامة من قماش للمعصم
- B – حزام دعم ظهري
- C – حزام دعم لراحة اليد

- 1) طابق المشد حول الرسغ المصاب (الأيسر أو الأيمن). ضع الإبهام في الفتحة التي بالجزء العلوي من الدعامة.
- 2) شكّل حزام الدعم الظهري (B) وضعه على ظهر اليد والمعصم. شكّل حزام دعم راحة اليد (C) على الجزء الداخلي من اليد والمعصم. ينبغي مسك اليد والمعصم بين حزامي الدعم (الظهري وراحة اليد).
- 3) شدّ وأغلق بإحكام الحزام الأوسط أولاً، مستخدماً لاصقة الإغلاق بالتلامس. ثم شدّ وأغلق بإحكام الحزامين الآخرين بإغلاق التلامس. عدل شدّ الأحزمة وفقاً للضغط والراحة المطلوبة.

العناية

اغسله في مياه باردة مع صابون معتدل ونشفها في الهواء. لا تستعمل مواد التبييض. لا تنظفه بالتنظيف الجاف أو بالنشافة. الكي ممنوع.

بدون لاتكس



مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

الكفالة بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.