


תומך FlexiForm לשורש כף היד

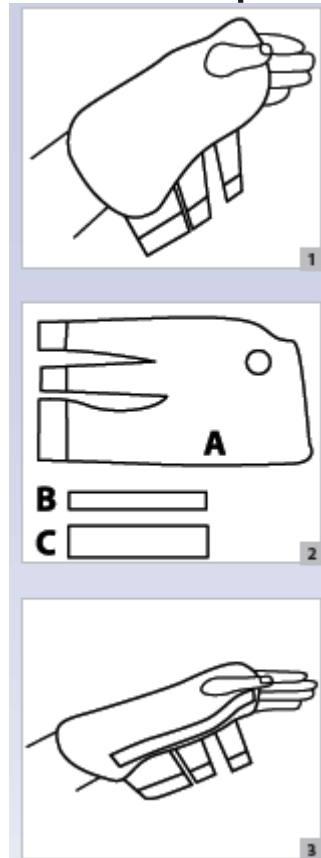

לפני שימוש באביזר יש לקרוא בקפידה את ההוראות הבאות במלואן. התאמה ויישום נכונים של האביזר חיוניים לתפקודו התקין.

שימוש מיועד/התוויות

- נקעים, מתיחות ופציעות של שורש כף היד.
- מניעת תזוזה של שורש כף היד לפני/לאחר ניתוח.

התוויות נגד

- אין

אזהרות

אם מופיעים במהלך השימוש במוצר זה כאב, נפיחות, שינויי תחושה או תגובות חריגות אחרות, יש לפנות מיד לרופא.

הוראות יישום

א' – תומך מבד לשורש כף היד

ב' – פס תמיכה לצד החיצוני

ג' – פס תמיכה לצד הפנימי

(1) הנח את התומך סביב שורש כף היד הפצוע (שמאל או ימין). הכנס את האגודל לפתח הנמצא בקצה התומך.

(2) עצב את הפס התומך העליון (ב') ומקם אותו בצד החיצוני של שורש כף היד וכף היד. עצב את פס התמיכה לצד הפנימי של כף היד (ג') ומקם אותו בצד הפנימי של שורש כף היד וכף היד. כף היד ושורש כף היד צריכים להימצא אחוזים בין שני הפסים (העליון והתחתון).

(3) ראשית סגור והדק את רצועת הצמדן האמצעית. לאחר מכן סגור והדק את שתי רצועות הצמדן האחרות. כוונן את מידת ההידוק של הרצועות בהתאם ללחץ ולנוחות הרצויים.

הוראות ניקוי

יש לכבס ביד במים קרים עם סבון כביסה עדין, ולייבש באוויר. אין להשתמש בחומר מלבין. אין לנקות בניקוי יבש או לייבש במייבש כביסה. אין לגהץ.

נטול לטקס

מיועד לשימוש של מטופל יחיד

אחריות: חברת DJO, LLC תתקן או תחליף את היחידה כולה או חלקים ממנה ואת אביזריה בשל פגמים בחומר או בעבודה, לתקופה של שישה חודשים מתאריך המכירה.

לתשומת לבך: למרות המאמץ והשיטות החדשניות הננקטות להשגת תאימות מרבית לתפקוד, לכוח, לעמידות ולנוחות, לא מובטח שהשימוש במוצר זה ימנע פגיעה.