


FlexiForm للرسغ والإبهام

FlexiForm POIGNET-POUCE

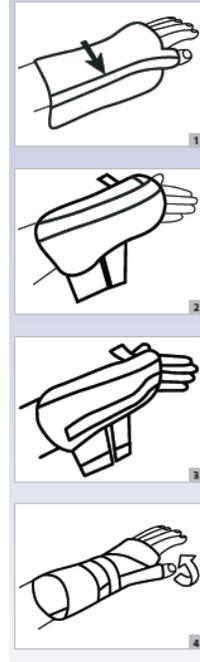

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل وبتمعن. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال

- مثالي للإلتواءات، الروماتيزم، إصابات المفاصل والأربطة في الرسغ والإبهام.

موانع الاستعمال

- لا توجد

تحذير واحتياطات

إذا ظهر ألم، تورم، تغيرات في الإحساس أو ردود فعل غير عادية أخرى أثناء استخدام هذا المنتج، عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تعليمات الاستخدام

- 1) طابق المشد حول الرسغ المصاب (الأيسر أو الأيمن). ضع الإبهام في غشاء في أعلى المشد.
- 2) شكّل وضع الحمالة الخاصة بالكف في داخل اليد والرسغ.
- 3) شكّل وضع حمالة الألمنيوم الخاصة بالإبهام لتحجز الإبهام في الفتحة.
- 4) شد وثبت أحزمة الاتصال المرفقة.
- 5) شد وثبت حزام الاتصال المرفقة الخاص بالإبهام حول الإبهام.
- 6) عدل شد الأحزمة وفقاً للضغط والراحة المطلوبة.

العناية

اغسله في مياه باردة مع صابون معتدل ونشفها في الهواء. لا تستعمل مواد التبييض. لا تنظفه بالتنظيف الجاف أو بالنشافة. الكي ممنوع.

بدون لاتكس



مخصص للاستخدام على مريض واحد فقط

الكفالة بإطار كفالة DJO, LLC سيتم تصليح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهود في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.